



1 Postup vykonania expozície celá noha, celá chrbtica

- 1 Pridajte do vyšetrenia súbor „celá noha, celá chrbtica FLFS“.
- 2 Vložte CR kazety (FLFS) do držiaka kaziet podľa obrázkov nižšie.
Zvláštnu pozornosť venujte orientácii kaziet:
 - Kazety vložte do držiaka čiernou stranou smerom k vám.
 - Kazety držte nálepkou smerom hore.

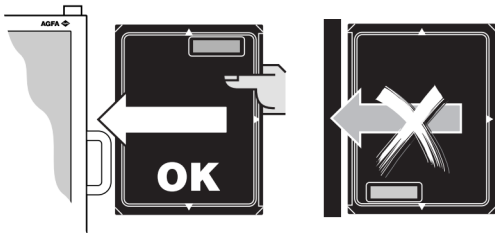

 *Poznámka: Nesprávne umiestnenie kaziet v držiaku spôsobí artefakty na snímkach.*

- 3 Vykonajte expozíciu „celá noha, celá chrbtica“.
- 4 Položte kazety do digitalizátora. Identifikujte čiastočné snímky zodpovedajúce expozíciám.

Po prijatí poslednej snímky do pracovnej stanice sa vo vyšetrení vytvorí extra snímka, ktorá bude obsahovať spojenú snímku FLFS.



Poznámka: Ak sa snímka FLFS nevytvorí automaticky, skontrolujte správne anatomické poradie čiastočných snímok.

Podrobné informácie nájdete v:

- Používateľskej príručky NX „Spájanie snímok celá noha, celá chrbtica“
- Používateľská príručka CR Full Leg Full Spine, časť „Základný postup práce“