

## 1 การเริ่มใช้งาน NX Office Viewer


- ดับเบิลคลิกที่ไอคอน NX Office Viewer จากเดสก์ทอปของคุณ หรือคลิกที่ **Start > (All) Programs > Agfa > เริ่ม Office Viewer**



หน้าจอ ล็อกอิน จะปรากฏขึ้น

- กรอกรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตี ป ล ง
- รหัสผ่านเริ่มต้นคือ **ป ล อ ย ว ่าง ไ ว้**

หน้าจอเริ่มต้นของ NX Office Viewer จะปรากฏขึ้น และโปรแกรมจะเปิดในโหมดปกติ

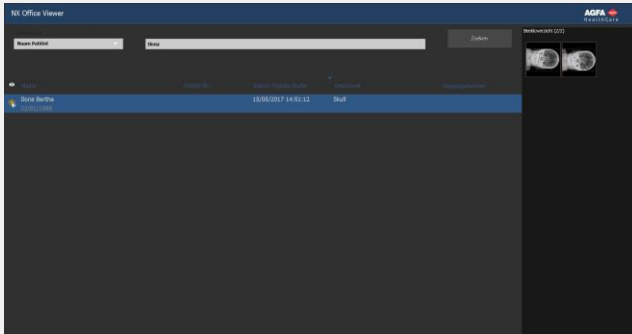

ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสผ่านที่กำหนดเองในการล็อกอินครั้งแรก


## 2 การค้นหาการตรวจ

- จากแถบค้นหา ให้ป้อนเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเรียกดูการตรวจสอบจาก In-Room NX Station



คุณสามารถค้นหาตามชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, หมายเลขเอกซเรย์ หรือวันที่ตรวจตามค่าเริ่มต้นแล้ว วันที่ตรวจจะถูกเลือกตามวันที่ที่ป้อนไว้ในฟิลด์ข้อความ

- คลิก ค้นหา เพื่อแสดงรายการการตรวจที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ

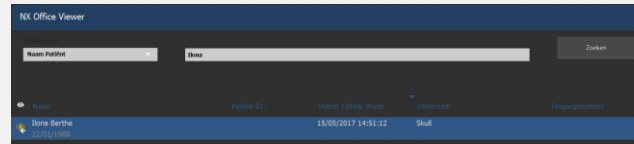

ไอคอนรูปดวงตานี้ปรากฏอยู่ถัดจากการตรวจในรายการงาน หากการตรวจเดียวกันนี้ถูกแสดงบนเวิร์กสเตชัน NX ภายในห้อง ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้อื่น




- คลิกหนึ่งในส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการ โดยใช้คอลัมน์ที่ถูกคลิกเป็นเกณฑ์ในการเรียงลำดับ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงที่ใช้ได้ (เรียงจากน้อยไปมาก หรือเรียงจากมากไปน้อย) โดยคลิกที่ส่วนหัวคอลัมน์อีกครั้ง

## 3 การเลือกภาพ

- เลือกการตรวจสอบจากรายการ

ในบานหน้าต่างภาพรวม ภาพทั้งหมดของการตรวจสอบนี้จะแสดงเป็นรูปขนาดย่อ

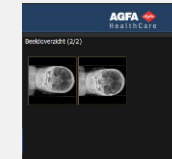

- คลิกรูปภาพที่คุณต้องการดู

ภาพที่เลือกจะแสดงเต็มหน้าจอ

โดยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยจะแสดงอยู่ที่มุมล่างซ้าย และข้อมูลการฉายแสดงอยู่ที่มุมขวาล่าง



## 4 การดูภาพ

**หมายเหตุ:** การเปลี่ยนแปลงภาพที่กระทำใน **NX Office Viewer** ไม่มีผลใดๆ ต่อภาพที่เก็บไว้ในเวิร์กสแตชัน **NX**

ย่อ/ขยาย ย้าย เลื่อนล้อยอนเมาส์

เข้าสู่ คลิกค้างไว้และเลื่อนเมาส์

ปรับหน้าต่าง/ระดับ ดับเบิลคลิกและเลื่อนเมาส์

Toggle Demographics	คลิกปุ่มเมาส์รอง และทำการเลือกในเมนูบริบท
Invert Image	
Next Image	
Previous Image	
Print Screenshot	
Save Screenshot as JPEG	

**หมายเหตุ:** ในการพิมพ์ภาพหน้าจอก่อน จะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ **Windows** บนพีซีที่ไม่สามารถพิมพ์ภาพไปยังเครื่องพิมพ์ทางการแพทย์ได้

ข้อควรระวัง:

ผลลัพธ์ของการพิมพ์และการบันทึกภาพหน้าจอก็คือภาพไม่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัย


- เมื่อต้องการออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่มใดๆ หรือคลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดงที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม



## 5 การเปรียบเทียบภาพ

- เมื่อต้องการสลับจากโหมดปกติไปยังโหมดเปรียบเทียบ ให้คลิกปุ่ม **โหมดเปรียบเทียบ**

- ในโหมดเปรียบเทียบ ให้เลือกสองภาพที่จะแสดงอยู่ข้างๆ กันในแบบเต็มหน้าจอ และคลิกปุ่ม **เปรียบเทียบภาพ**

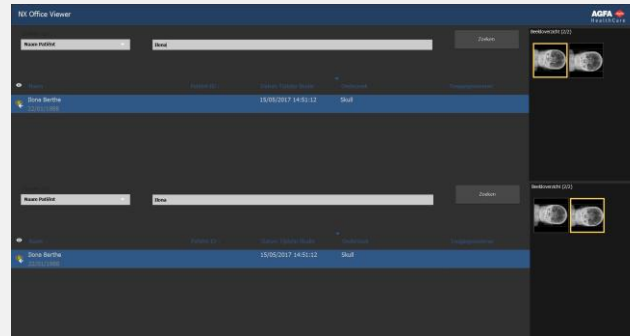

ภาพจากการตรวจสอบในรายการตรวจสอบด้านบนจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ



คุณสามารถทำการดูแต่ละภาพในลักษณะแยกจากกันได้เหมือนในโหมดปกติ  
**เฉพาะ** พิมพ์ภาพหน้าจอ และ บันทึกภาพหน้าจอเป็น **JPEG**  
เท่านั้นที่จะมีผลกับภาพทั้งสองร่วมกัน