


1 Recuperarea informațiilor despre pacienți

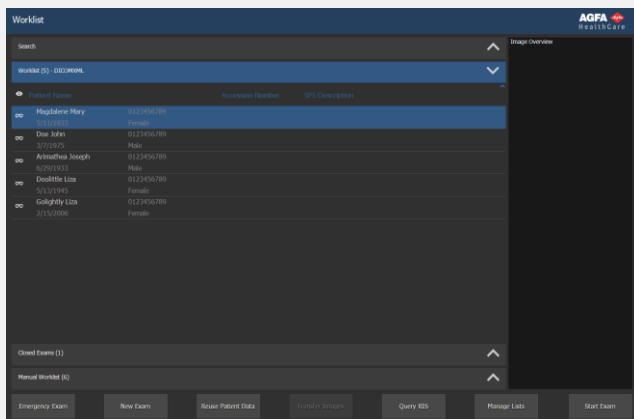

Listă de sarcini

Examen medical

Editare

■ Recuperare informații despre pacienți de la SIR (selectați un pacient și executați clic pe Începere examen).


Începere examen

SAU

■ Executați clic pe Examen nou și introduceți manual informațiile despre pacient (de exemplu, dacă SIR este indisponibil).

Examen nou

2 Selectarea examenelor

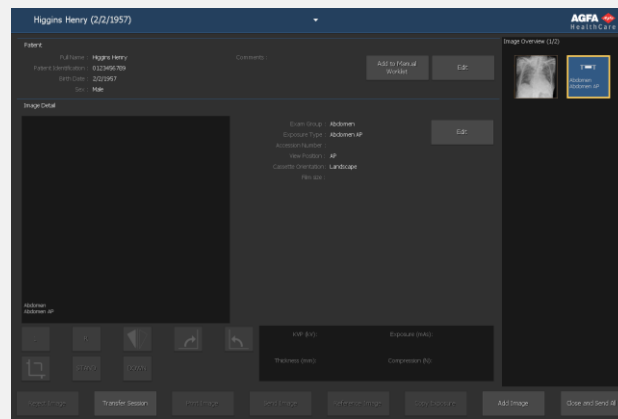

Listă de sarcini

Examen medical

Editare

■ Folosiți Adăugare imagine pentru a selecta examenul dorit. Dacă sistemul dumneavoastră este configurat să interpreteze codurile de protocol, examenul poate fi preselectat.

Adăugare imagine

3 Pregătirea expunerii

■ Selectați miniatura pentru expunere

Detectorul RD selectat este activat.

Parametrii impliciți de expunere radiografică pentru examenul sau expunerea selectat(ă) sunt trimiși la aparatul de diagnosticare.

■ Verificați setările de expunere.

4 Efectuarea expunerii

■ Poziționați pacientul și efectuați expunerea.

Imaginea este preluată de la detectorul RD și afișată în miniatură.

Nu selectați o altă miniatură până când imaginea de previzualizare nu este vizibilă în miniatura activă. Este posibil ca imaginea preluată să nu fie asociată expunerii corecte.

Dacă este aplicată colimația tubului, imaginea este decupată automat în zona chenarelor de colimație.

5 Realizarea controlului de calitate

■ Este posibil să fie nevoie să închideți fereastra Adăugare imagine.

■ Evaluați calitatea imaginii și pregătiți imaginile pentru diagnosticare (de exemplu, folosind marcasele S/D, reflectând sau rotind imaginile).

■ Dacă toate imaginile sunt în regulă, puteți efectua operațiunile de închidere și trimitere.

Închidere și trimitere

■ În funcție de configurație, imaginile vor fi trimise la o imprimantă sau la un PACS (Sistem de Comunicare și Arhivare a Imaginilor).

6 Despre posibilitățile complexe de Editare



Listă de sarcini Examen medical Editare

■ În fila Editare există mai multe funcții de adnotare, procesare a imaginilor (la nivel de fereastră) și imprimare.

Butoanele principale

Listă de sarcini Examen medical Editare

Examen
urgentă

Deschide un examen de urgență fără detalii ale pacienților

Interogare SIR

Face o Interogare SIR (reîmprospătează listele de sarcini SIR) înainte de a începe să selectați pacientii.

Reutilizare
date pacient

Reutilizează datele pacientului pentru un examen nou.

Listă de sarcini Examen medical Editare



Rotește și inversează imaginile.



Afișează/ascunde chenarul negru



Adaugă un marcaj stânga sau dreapta pe o imagine.

Respingere
imagine

Respinge o imagine în cazul în care calitatea acesteia nu este satisfăcătoare.

Listă de sarcini Examen medical Editare




Reglează manual contrastul și intensitatea globală ale unei imagini (Fereastră/Nivel).



Inversează părțile saturate ale imaginii, adică albul este afișat ca negru și invers (Ardere).




Indică manual chenarele de colimație pe imagine și comandă NX să reproceseze imaginile în consecință (colimație manuală).

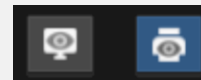

Comută între modurile Copie electronică și Imprimare.

1 Recuperarea informațiilor despre pacienți

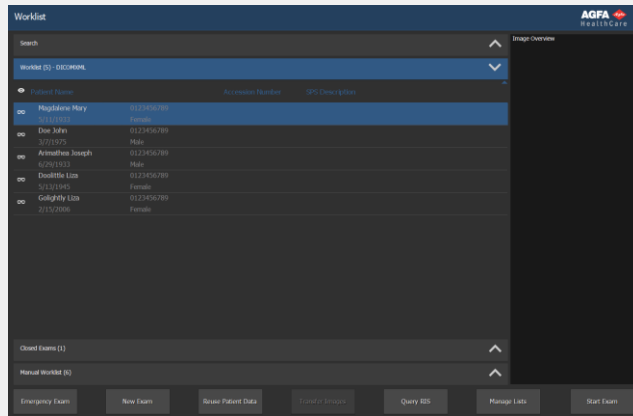

Listă de sarcini

Examen medical

Editare

■ Recuperare informații despre pacienți de la SIR (selecți un pacient și executați clic pe Începere examen).


Începere examen

SAU

■ Executați clic pe Examen nou și introduceți manual informațiile despre pacient (de exemplu, dacă SIR este indisponibil).

Examen nou

2 Selectarea examenelor

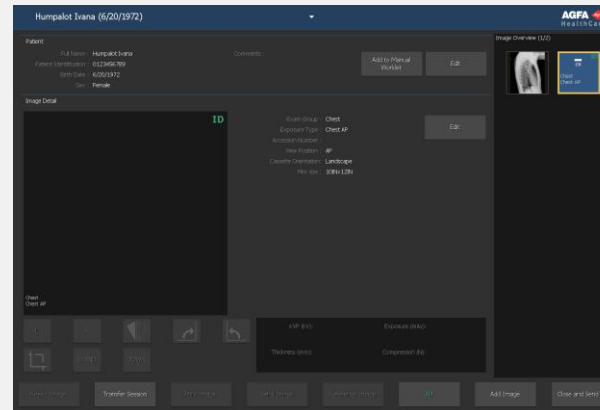

Listă de sarcini

Examen medical

Editare

■ Folosiți Adăugare imagine pentru a selecta examenul dorit. Dacă sistemul dumneavoastră este configurat să interpreteze codurile de protocol, examenul poate fi preselectat.

Adăugare imagine

3 Identificarea casetelor

- Selectați imaginea și executați clic pe ID.
- În imagini va apărea o pictogramă ID.
- Puteți realiza expunerea radiografică înainte sau după identificare.

ID

4 Digitizarea imaginilor

- Introduceți caseta în digitizor.
- Imaginea va apărea în panoul Prezentare imagine de pe stația de lucru NX.

5 Realizarea controlului de calitate

- Este posibil să fie nevoie să închideți fereastra Adăugare imagine.
- Evaluați calitatea imaginii și pregătiți imaginile pentru diagnosticare (de exemplu, folosind marcasele S/D, reflectând sau rotind imaginile).
- Dacă toate imaginile sunt în regulă, puteți efectua operațiunile de Închidere și trimitere.
- În funcție de configurație, imaginile vor fi trimise la o imprimantă sau la un PACS (Sistem de Comunicare și Arhivare a Imaginilor).

Închidere și trimitere

6 Despre posibilitățile complexe de Editare



Listă de sarcini Examen medical **Editare**

■ În fila Editare există mai multe funcții de adnotare, procesare a imaginilor (la nivel de fereastră) și imprimare.

Butoanele principale

Listă de sarcini Examen medical **Editare**

Examen urgentă

Deschide un examen de urgență fără detalii ale pacienților

Interogare SIR

Face o Interogare SIR (reîmprospătează listele de sarcini SIR înainte de a începe să selectați pacientii).

Reutilizare date pacient

Reutilizează datele pacientului pentru un examen nou.

Listă de sarcini Examen medical **Editare**



Rotește și inversează imaginile.



Afișează/ascunde chenarul negru



Adaugă un marcaj stânga sau dreapta pe o imagine.

Respingere imagine

Respinge o imagine în cazul în care calitatea acesteia nu este satisfăcătoare.

Listă de sarcini Examen medical **Editare**




Reglează manual contrastul și intensitatea globală ale unei imagini (Fereastră/Nivel).



Inversează părțile saturate ale imaginii, adică albul este afișat ca negru și invers (Ardere).



Indică manual chenarele de colimație pe imagine și comandă NX să reproceseze imaginile în consecință (colimație manuală).

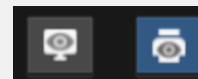

Comută între modurile Copie electronică și Imprimare.