

## 1 NX Office Viewer starten

- Dubbelklik op het NX Office Viewer-pictogram op uw bureaublad of klik op Start > (Alle) Programma's > Office Viewer starten.




Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven.

- Voer uw wachtwoord in en klik op OK.

Het standaardwachtwoord is blanco.


Het informatiescherm van NX Office Viewer verschijnt en de toepassing wordt geopend in Normale modus.

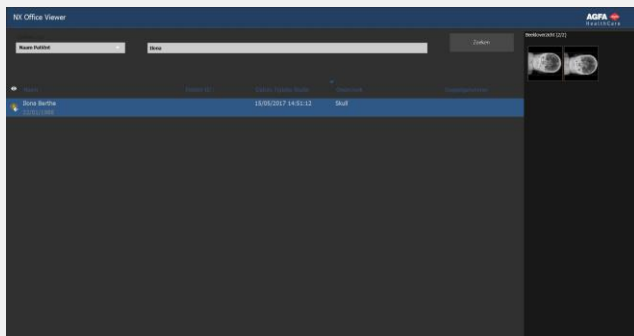

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord te vervangen door een eigen wachtwoord, wanneer u voor het eerst inlogt.

## 2 Zoeken naar onderzoeken


- Voer in het paneel Zoeken specifieke criteria in om onderzoeken van een lokaal NX-station op te halen.

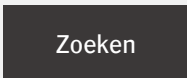

U kunt zoeken op patiëntnaam, patiënt-ID, toegangsnummer of onderzoeksdatum.

De standaardselectie is Datum Onderzoek met de actuele datum in het tekstveld.

- Klik op Zoeken om een lijst van onderzoeken te zien die aan uw criteria voldoen.

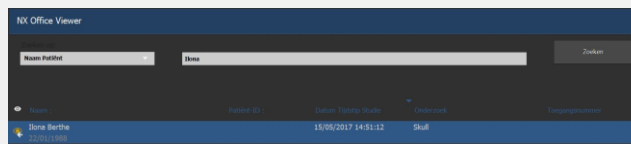

Het oog-pictogram verschijnt naast het onderzoek in de werklIJst, wanneer hetzelfde onderzoek wordt bekeken op een lokaal NX-werkstation. Het wordt dan mogelijk gewijzigd door een andere gebruiker.



- Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van de geselecteerde kolom.

U kunt de mogelijke sorteervolgorde doorlopen (oplopend of aflopend) door nogmaals op de kolomkop te klikken.

## 3 Een beeld selecteren

- Selecteer een onderzoek in de lijst.

Alle beelden van dit onderzoek verschijnen als miniatures in het overzichtsvenster.



- Klik op het beeld dat u wilt weergeven.

Het geselecteerde beeld verschijnt op volledige schermgrootte met de patiëntgegevens in de linkeronderhoek en de belichtingsgegevens in de rechteronderhoek.



## 4 Beelden bekijken

Opmerking: Beeldwijzigingen die in NX Office Viewer worden aangebracht, hebben geen invloed op het beeld dat is opgeslagen op het NX-werkstation.

- in- en uitzoomen      Draai aan het muiswiel
  - beeldweergave verplaatsen      Verplaats de muis met ingedrukte muisknop
  - Window/Level aanpassen      Dubbelklik en verplaats de muis
- Toggle Demographics

Invert Image

Next Image

Previous Image

Print Screenshot

Save Screenshot as JPEG
- Klik op de secundaire muisknop en maak een keuze in het contextmenu.

Opmerking: wanneer u een screenshot wilt afdrucken moet er een Windows-printer op de pc zijn aangesloten. U kunt dit beeld niet afdrucken op een medische printer.


Let op: Wanneer u een screenshot afdruckt of opslaat, is dit altijd in niet-diagnostische kwaliteit.

- Druk op een willekeurige toets of klik op het rode kruis in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster om de volledig-schermweergave te sluiten.



## 5 Beelden vergelijken

- Klik op de knop Modus Vergelijken om over te schakelen van de Normale modus naar de Vergelijksmodus.
- Selecteer in de Vergelijksmodus twee beelden die u naast elkaar wilt weergeven op volledig scherm en klik op de knop Beelden vergelijken.

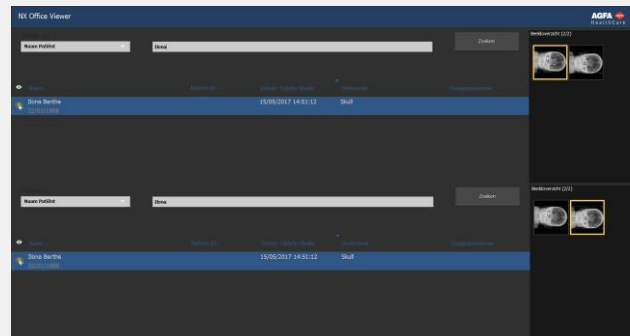

Het beeld van het onderzoek uit de bovenste onderzoekslijst verschijnt links op het scherm. Het beeld van het onderzoek uit de onderste onderzoekslijst verschijnt rechts op het scherm.



U kunt dezelfde weergavebewerkingen als in de Normale modus uitvoeren op beide beelden afzonderlijk. Alleen Schermbeeld afdrucken en Schermbeeld opslaan als JPEG hebben altijd betrekking op de beide beelden samen.