

## 1 Starten von NX Office Viewer

- Doppelklicken Sie auf das NX Office Viewer Symbol auf dem Desktop, oder klicken Sie auf Start > (Alle) Programme > Agfa > Office Viewer starten.




Der Bildschirm Anmeldung wird angezeigt.

- Geben Sie Ihr Passwort ein, und klicken Sie auf OK.

Das Standardpasswort ist leer.

Der NX Office Viewer Begrüßungsbildschirm wird aufgerufen und die Anwendung wird im Normalmodus geöffnet.

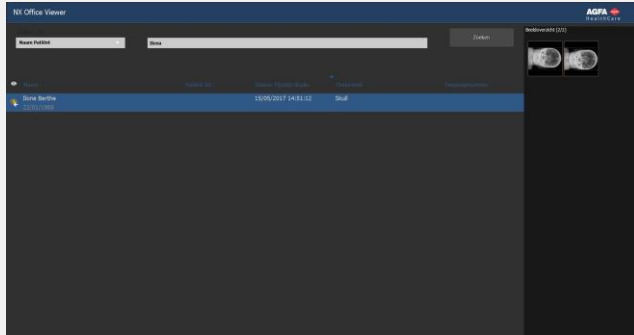

Es ist ratsam, das Standardpasswort bei der ersten Anmeldung in ein benutzerspezifisches Passwort zu ändern.

## 2 Suchen nach Untersuchungen


- Geben Sie im Teilfenster „Suchen“ spezifische Kriterien für das Abrufen von Untersuchungen auf einer NX-Station in einem Behandlungsraum ein.



Es ist möglich, nach Patientennamen, Patienten-ID, Zugangsnummer oder Untersuchungsdatum zu suchen.

In der Standardeinstellung ist „Untersuchungsdatum“ ausgewählt, wobei das aktuelle Datum im Textfeld eingetragen ist.

- Klicken Sie auf Suchen, um eine Liste der Untersuchungen anzuzeigen, die Ihre Kriterien erfüllen.

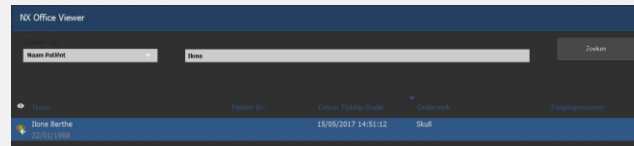

Dieses Augensymbol wird neben der Untersuchung in der Arbeitsliste eingeblendet, wenn diese Untersuchung auch auf der NX-Arbeitsstation in einem Behandlungsraum angeschaut wird. Sie könnte von einem anderen Benutzer geändert werden.




- Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften, um die Liste mit der angeklickten Spalte als Sortierkriterium neu zu sortieren.

Sie können zwischen den verfügbaren Sortierreihenfolgen (aufsteigend oder absteigend) wechseln, indem Sie erneut auf die Spaltenüberschrift klicken.

## 3 Wählen eines Bildes

- Wählen Sie eine Untersuchung aus der Liste aus.

Im Teilfenster „Bildübersicht“ werden alle Bilder der Untersuchung als Miniaturansichten angezeigt.

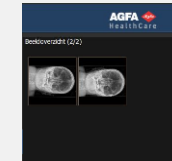

- Klicken Sie auf das Bild, das Sie anzeigen möchten.

Das gewählte Bild wird über den gesamten Bildschirm angezeigt, mit den demografischen Patientendaten unten links und den Belichtungsdaten unten rechts.



## 4 Anzeigen von Bildern

Hinweis: Änderungen am Bild, die im NX Office Viewer vorgenommen werden, wirken sich nicht auf das Bild aus, das auf der NX-Arbeitsstation gespeichert ist.

**Zoomen** Das Mausrad drehen  
**wandern** Klicken, Taste gedrückt halten und Maus verschieben

**Kontrast/Helligkeit einstellen** Doppelklicken und Maus verschieben



Klicken Sie auf die sekundäre Maustaste, und treffen Sie im Kontextmenü eine Auswahl.

Hinweis: Für das Ausdrucken eines Bildschirmabzugs muss ein Windows-Drucker auf dem PC installiert sein. Auf einem medizinischen Drucker können die Bilder nicht gedruckt werden.

Vorsicht: Beim Drucken und Speichern eines Bildschirmabzugs ist das Resultat immer eine nicht diagnostaugliche Qualität.


■ Um die Vollbildansicht zu schließen, drücken Sie eine beliebige Taste oder klicken auf das rote Kreuz im Anwendungsfenster oben rechts.



## 5 Vergleichen von Bildern

■ Um vom Normalmodus in den Vergleichsmodus zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche Vergleichsmodus.

■ Wählen Sie im Vergleichsmodus zwei Bilder aus, die Sie nebeneinander in der Vollbildansicht anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bilder vergleichen.

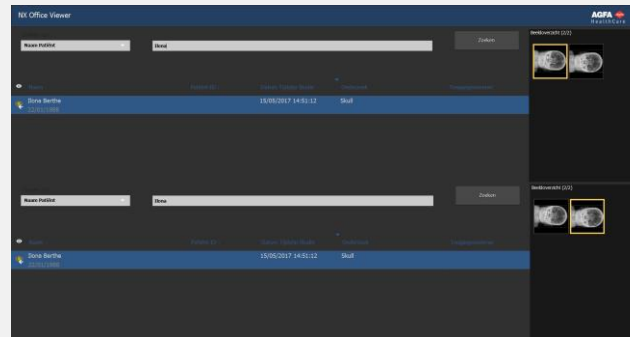

Das Bild aus der Untersuchung in der oberen Untersuchungsliste wird im Bildschirm links dargestellt. Das Bild aus der Untersuchung in der unteren Untersuchungsliste wird im Bildschirm rechts dargestellt.



Die gleichen Anzeigeaktionen wie im Normalmodus können auf beide Bilder separat angewendet werden. Nur die Befehle Bildschirmabzug drucken und Bildschirmabzug als JPEG speichern gelten immer für beide Bilder zusammen.