

1 การเริ่มใช้งาน NX Office Viewer

- ดับเบิลคลิกที่ไอคอน NX Office Viewer จากเดสก์ทอปของคุณ หรือคลิกที่ **Start > (All) Programs > Agfa > เริ่ม Office Viewer**




หน้าจอ ล็อกอิน จะปรากฏขึ้น

- กรอกรหัสผ่าน จากนั้นคลิก **ตกลง**

รหัสผ่านเริ่มต้นคือ **ปล่อยให้ว่างไว้**

หน้าจอเริ่มต้นของ NX Office Viewer จะปรากฏขึ้น และโปรแกรมจะเปิดในโหมดปกติ

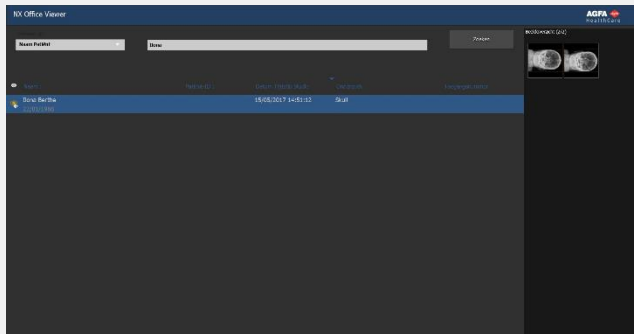

ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสผ่านที่กำหนดเองในการล็อกอินครั้งแรก

2 การค้นหาการตรวจ

- จากแถบค้นหา ให้ป้อนเกณฑ์ที่เฉพาะสำหรับเรียกค้นการตรวจจาก In-Room MUSICA Acquisition




คุณสามารถค้นหาตามชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, หมายเลขแอกเซชัน หรือวันที่ตรวจ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว

วันที่ตรวจจะถูกเลือกตามวันที่ที่ป้อนไว้ในฟิลด์ข้อความ

- **คลิก ค้นหา**

เพื่อแสดงรายการการตรวจที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ

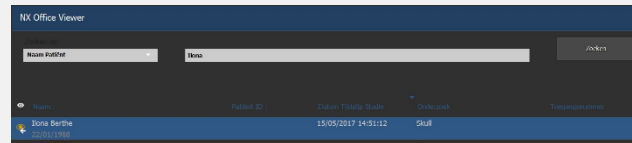

ไอคอนรูปดวงตาจะปรากฏขึ้นติดกับส่วนการตรวจ ในรายการงานหากการตรวจที่เหมือนกันกำลังแสดงผลอยู่ที่ In-Room MUSICA Acquisition Workstation ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้อื่น




- **คลิกหนึ่ง** ในส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการโดยใช้คอลัมน์ที่ถูกคลิกเป็นเกณฑ์ในการเรียงลำดับ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงที่ใหม่ได้ (เรียงจากน้อยไปมาก หรือเรียงจากมากไปน้อย) โดยคลิกที่ส่วนหัวคอลัมน์อีกครั้ง

3 การเลือกภาพ

- **เลือกการตรวจสอบจากรายการ**

ในบานหน้าต่างภาพรวม ภาพทั้งหมดของการตรวจสอบนี้จะแสดงเป็นรูปขนาดย่อ

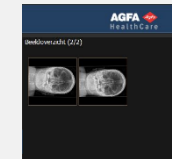

- **คลิกรูปภาพที่คุณต้องการดู**

ภาพที่เลือกจะแสดงเต็มหน้าจอ

โดยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยจะแสดงอยู่ที่มุมล่างซ้าย และข้อมูลการฉายแสดงอยู่ที่มุมขวาล่าง



4 การดูภาพ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภาพที่ดำเนินการจาก Office Viewer จะไม่มีผลต่อภาพที่จัดเก็บใน MUSICA Acquisition Workstation

ย่อ/ขยาย	เลื่อนล้อบนเมาส์
เข้าสู่	คลิกค้างไว้และเลื่อนเมาส์
ปรับหน้าต่าง/ระดับ	ดับเบิลคลิกและเลื่อนเมาส์
	คลิกปุ่มเมาส์รอง และทำการเลือกในเมนูบริบท


หมายเหตุ: ในการพิมพ์ภาพหน้าจอ จะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ Windows บนพีซี
ไม่สามารถพิมพ์ภาพไปยังเครื่องพิมพ์ทางการแพทย์ได้
ข้อควรระวัง:
ผลลัพธ์ของการพิมพ์และการบันทึกภาพหน้าจอมีคุณภาพไม่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัย

- เมื่อต้องการออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่มใดๆ หรือคลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดงที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม



5 การเปรียบเทียบภาพ

- เมื่อต้องการสลับจากโหมดปกติไปยังโหมดเปรียบเทียบ ให้คลิกปุ่ม โหมดเปรียบเทียบ
- ในโหมดเปรียบเทียบ ให้เลือกสองภาพที่จะแสดงอยู่ข้างๆ กันในแบบเต็มหน้าจอ และคลิกปุ่ม **เปรียบเทียบภาพ**

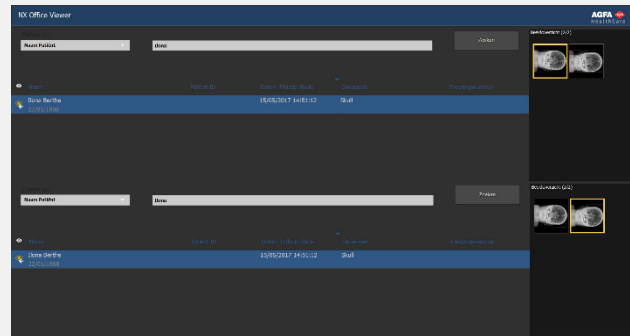

ภาพจากการตรวจสอบในรายการตรวจสอบด้านบนจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
ภาพจากการตรวจสอบในรายการตรวจสอบด้านล่างจะแสดงอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ



คุณสามารถทำการดูแต่ละภาพในลักษณะแยกจากกันได้เหมือนในโหมดปกติ เฉพาะ **พิมพ์ภาพหน้าจอ** และ **บันทึกภาพหน้าจอเป็น JPEG** เท่านั้นที่จะมีผลกับภาพทั้งสองร่วมกัน