

# DR 600 - Démarrage du système



**1. Enclenchez l'interrupteur électrique de la salle**



La touche permettant de passer du mode manuel au mode automatique se trouve à l'arrière du collimateur

**2. Veillez à ce que :**

- Le collimateur soit en mode automatique
- Les grilles mobiles soient fermées
- La grille est correctement insérée




**3. Appuyez sur le bouton de mise sous tension situé sur le boîtier de commande du générateur de rayons X**

Ne touchez pas l'appareil à rayons X avant d'avoir entendu 3 bips.



**4. Démarrez le poste de travail NX.**

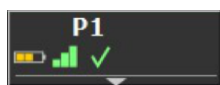

**5. Mettez le ou les détecteurs DR sans fil sous tension.**

Trois minutes peuvent s'écouler avant que le statut du détecteur DR sur NX soit prêt.