



# การฆ่าเชื้อโรคสำหรับคาสเซ็ท

ในการฆ่าเชื้อโรคสำหรับคาสเซ็ท ให้ใช้เฉพาะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับการอนุมัติจาก Agfa (ดูรายการน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านการอนุมัติ) หากมีแผนใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ จะต้องขอการรับรองจาก Agfa ก่อนใช้งาน  
เนื่องจากน้ำยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่อาจทำให้คาสเซ็ทเสียหายได้  
ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  
โปรดดูคำแนะนำสำหรับการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นๆ

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการฆ่าเชื้อโรค

คำเตือน:



ก่อนที่จะทำการฆ่าเชื้อบนคาสเซ็ท  
ให้เอาเพลตภาพออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาสเซ็ทสะอาดแล้ว  
หากจำเป็น คุณสามารถทำความสะอาดด้านนอกของคาสเซ็ท  
โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ (น้ำสบู่)

คำเตือน:



อย่าใช้ **AGFA CR Phosphor Plate Cleaner**, แผ่นเช็ด **PROSAT**,  
น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอ **AGFA CURIX**  
หรือน้ำยาทำความสะอาดหน้าจออื่น ๆ  
หรือแอลกอฮอล์ที่มีของเหลวเป็นส่วนผสมกับพื้นผิวคาสเซ็ท  
เนื่องจากอาจทำให้คาสเซ็ทได้รับความเสียหาย

คำเตือน:



อย่าเทหรือพ่นของเหลวลงบนพื้นผิวคาสเซ็ทโดยตรง  
ให้ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุยขุบสารละลายพอเหมาะ  
(อย่าให้เปียกชุ่ม)

คำเตือน:



ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

คำเตือน:



น้ำยาฆ่าเชื้อโรค/ผ้าชุบน้ำยาอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวง  
ตาและผิวหนัง ภายหลังการใช้งาน ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด

และก่อนที่จะใช้งาน

ควรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (Material Safety Data Sheets - MSDS) ของผู้ผลิต รวมถึงคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์



คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาสเซ็ทถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมก่อนการจัดส่ง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวทั้งหมดแห่งสนิทแล้วก่อนที่จะส่งคาสเซ็ทกลับไปใช้งานอีกครั้ง



ทำตามคำแนะนำสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ

## น้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรอง

---

น้ำยาฆ่าเชื้อต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุในคาสเซ็ท และสามารถใช้นบนพื้นผิวด้านนอกของคาสเซ็ท

### น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรกรดอินทรีย์:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (แบบเช็ดหรือแบบพ่น) (multiGREEN® เป็นเครื่องหมายการค้าของ ulti med Products (Deutschland) GmbH)

### น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรเกลือแอมโมเนียจตุรภาค:

- แผ่นเช็ด mikroqid® (mikroqid เป็นเครื่องหมายการค้าของ Schülke&Mayr GmbH)
- แผ่นเช็ดแบบใช้แล้วทิ้ง Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth เป็นเครื่องหมายการค้าของ PDI®)



ข้อควรระวัง:

การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรเกลือแอมโมเนียจตุรภาคเป็นประจำอาจทำให้ชิ้นส

วนของคาสเซ็ทต์แตกตัว หลีกเลี่ยงการใช้เป็นประจำ  
แนะนำให้จำกัดการใช้ < 50 ครั้งตลอดอายุการใช้งานของคาสเซ็ทต์

## การใช้ของพลาสติกห่อหุ้ม

---

หากใช้คาสเซ็ทต์ในสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อ  
หรืออาจมีการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวอื่นๆ จากร่างกาย  
ให้ใช้ของพลาสติกเพื่อป้องกันคาสเซ็ทต์จากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองพลาสติกไม่ยับย่นเพื่อป้องกันไม่ให้มีรอยยับปรากฏบนภาพ

## การปฏิเสธความรับผิดชอบ

---

การเลือกและคำอธิบายของกระบวนการและนโยบายการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมถือเป็นความ  
รับผิดชอบของผู้ใช้