



Dezinfekcija kasete

Za dezinfekciju kasete koristite isključivo dezinfekcijska sredstva koja je odobrila tvrtka Agfa (pogledajte spisak odobrenih dezinfekcijskih sredstava). Ako namjeravate upotrebljavati druga dezinfekcijska sredstva, prije uporabe ishodite odobrenje od tvrtke Agfa jer većina dezinfekcijskih sredstava može uništiti kasetu. UV dezinfekcija također nije dopuštena.

Za detaljne informacije o primjeni dezinfekcijskog sredstva pročitajte upute za upotrebu priložene dezinfekcijskom sredstvu.

Sigurnosne napomene za dezinfekciju



UPOZORENJE:

Prije dezinficiranja kasete izvadite ploču za snimanje i uvjerite se da je kasetna čista.

Po potrebi možete očistiti vanjski dio kasete, po mogućnosti samo vlažnom krpom (voda, sapun).



UPOZORENJE:

Nemojte nanositi sredstvo AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT maramice, AGFA CURIX sredstvo za čišćenje ekrana ili bilo koje drugo sredstvo za čišćenje ekrana ili alkoholnu tekućinu na površinu kasete jer je to može oštetiti.



UPOZORENJE:

Nikada ne izlivajte ili prskajte tekućinu izravno na površinu kasete, uvijek koristite čistu krpu koja ne ispušta dlačice navlaženu (ne namočenu) otopinom.



UPOZORENJE:

Koristite na područjima s dobrim prozračivanjem.



UPOZORENJE:

Dezinfekcijska otopina/maramice mogu uzrokovati nadraženost očiju i kože. Nakon upotrebe operite ruke

sapunom i vodom. Za dodatne informacije prije upotrebe pročitajte Sigurnosno-tehničke listove (MSDS) i preporuke na etiketi proizvoda.



UPOZORENJE:

Uvjerite se da je kasete pravilno dekontaminirana i dezinficirana prije transporta.



Svakako temeljito obrišite sve površine prije vraćanja kasete u uporabu.



Slijedite upute za korištenje navedene na sredstvu za čišćenje / dezinfekciju.

Odobrena dezinfekcijska sredstva

Utvrđeno je kako su sljedeća dezinfekcijska sredstva kompatibilna s materijalom kasete te se mogu upotrebljavati na njezinoj vanjskoj površini.

Dezinficijens na bazi organskih kiselina:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (maramice ili sprej) (multiGREEN® je zaštitni znak tvrtke ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Dezinfekcijsko sredstvo na bazi kvartarne amonijeve soli:

- mikroqid® nježne maramice (mikroqid je zaštitni znak poduzeća Schülke&Mayr GmbH)
- Sani-Cloth® Active jednokratne maramice (Sani-Cloth je zaštitni znak tvrtke PDI®)

**OPREZ:**

Česta uporaba dezinficijensa na bazi kvarterne amonijeve soli može prouzročiti lom dijelova kasete. Stoga izbjegavajte čestu uporaba, preporučuje se ograničiti uporabu na < 50 puta tijekom radnog vijeka kasete.

Upotreba zaštitnog plastičnog omota

Ako se kasete upotrebljava u okolini gdje je potrebna dezinfekcija ili gdje bi mogla doći u kontakt s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama, zaštitite je od izravnog kontakta s bolesnikom pomoću plastičnog omota. Vodite računa da plastični omot ne bude naboran kako se nabori ne bi vidjeli na snimci.

Isključenje odgovornosti

Odabir i opis odgovarajućeg dezinfekcijskog postupka i dezinfekcijske politike spada u odgovornost korisnika.