

Čitač crtičnog koda

Priručnik za korisnika

Opseg ovog priručnika


Ovaj priručnik sadrži informacije o čitačima crtičnih kodova na sustavima DR.

Čitači crtičnog koda koriste se za olakšavanje identifikacije pacijenta u softveru MUSICA Acquisition Workstation. Čitači crtičnog koda dostupni su kao dodatak.

Čitač crtičnog koda CS4070

Postavljanje čitača crtičnog koda uključuje sljedeće dijelove:

- Čitač crtičnog koda na baterije
- Postolje za punjenje priključeno na utičnicu napajanja koja služi za pohranu čitača crtičnog koda i punjenje baterije.

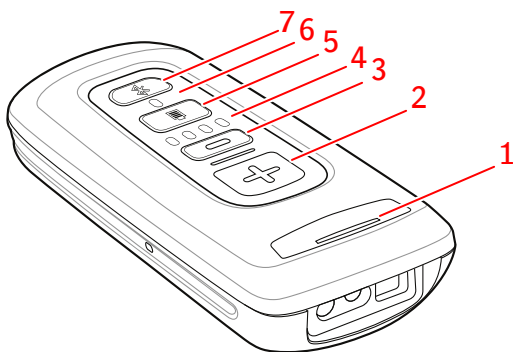

1. Statusna LED žaruljica

LED žaruljica tijekom punjenja trepće žuto.

LED žaruljica stalno svijetli zeleno kad je baterija sasvim napunjena.

2. Gumb za skeniranje.

Za skeniranje crtičnog koda, pritisnite gumb za skeniranje dok je uređaj usmjeren na crtični kod.

3. Gumb za brisanje.

Ne koristi se.

4. Indikatori razine napunjenosti baterije.

Tijekom punjenja prikazuje se razina napunjenosti baterije.

5. Gumb razine napunjenosti baterije.

6. LED žaruljica Bluetootha.

LED žaruljica Bluetootha trepće svake 4 sekunde kad je čitač crtičnog koda spreman za rad.

LED žaruljica Bluetootha nekoliko sekundi brzo trepće kad je izgubljena veza s USB pristupnom točkom.

7. Gumb Bluetooth.


Slika 1: Upravljački elementi na čitaču crtičnog koda

Više pojedinosti o radu i konfiguriranju čitača crtičnog koda, pogledajte dokumentaciju proizvođača uređaja.

Čitač crtičnog koda CS6080

Postavljanje čitača crtičnog koda uključuje sljedeće dijelove:

- Čitač crtičnog koda na baterije
- Postolje za punjenje priključeno na utičnicu napajanja koja služi za pohranu čitača crtičnog koda i punjenje baterije.

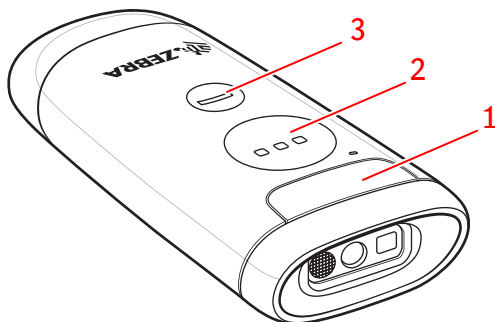

1. Statusna LED žaruljica

LED žaruljica tijekom punjenja trepće žuto.

LED žaruljica stalno svijetli zeleno kad je baterija sasvim napunjena.

2. Gumb za skeniranje.

Za skeniranje crtičnog koda, pritisnite gumb za skeniranje dok je uređaj usmjeren na crtični kod.

3. Gumb koji je moguće programirati.

Ne koristi se.

Slika 2: Upravljački elementi na čitaču crtičnog koda

Više pojedinosti o radu i konfiguriranju čitača crtičnog koda, pogledajte dokumentaciju proizvođača uređaja.

Rješavanje problema

Prekinuta je Bluetooth veza čitača crtičnog koda

Detalji	Bluetooth LED brzo trepće kad je izgubljena veza s računalom.
Uzrok	Putem Bluetooth veze nije uspjelo uparivanje čitača crtičnog koda s računalom.
Brzo rješenje	<ol style="list-style-type: none">1. U području Action Center (Centar za radnje) u sklopu sustava Windows kliknite ikonu za Bluetooth i odaberite opciju add bluetooth device (Dodaj Bluetooth uređaj).2. Pritisnite gumb za skeniranje na čitaču crtičnog koda da biste aktivirali uređaj.3. Pritisnite i pet sekundi zadržite gumb za Bluetooth na čitaču crtičnog koda. Čitač crtičnog koda oglasit će se zvučnim signalom, a gumb za Bluetooth brzim će treptanjem dati do znanja da računalo može otkriti uređaj.4. S popisa otkrivenih Bluetooth uređaja odaberite naziv modela čitača crtičnog koda i uparite ga. Skener će zvučnim signalom dati do znanja da je uparen.