

# Vonalkódolvasó

---

## Felhasználói kézikönyv

# A kézikönyv tartalma

---


A jelen kézikönyv a DR rendszerekbe épített vonalkódolvasókról tartalmaz információkat.

A vonalkódolvasók a betegek azonosításának megkönnyítésére szolgálnak a MUSICA Acquisition Workstation munkaállomáson. A vonalkódolvasók opcióként kaphatók.

# CS4070 vonalkódolvasó

A vonalkód olvasó beállítás a következő komponenseket tartalmazza:

- Akkumulátorral működő vonalkód olvasó
- A hálózati aljzathoz csatlakoztatott töltőállvány, amely a vonalkódolvasó tárolására és az akkumulátor töltésére szolgál.

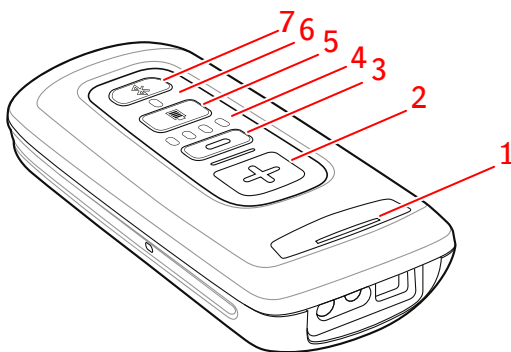

## 1. Állapot LED

A LED sárgán villog töltés közben.

A LED zöld színű, amikor a teljesen feltöltődött.

## 2. Scan (Keresés) gomb.

A vonalkód olvasóval végzett beolvasáshoz nyomja meg a Scan (Keresés) gombot, miközben az eszközt a vonalkódra irányítja.

## 3. Törlés gomb.

Nincs használatban.

## 4. Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzői.

Töltés közben látható a töltöttségi szint.

## 5. Akkumulátor töltöttségi szint gomb.

## 6. Bluetooth LED.

A bluetooth LED 4 másodpercenként felvillan, amikor a vonalkód olvasó működésre kész.

A bluetooth LED néhány másodpercig gyorsan villog, ha megszakadt a kapcsolat az USB hozzáférési ponttal.

## 7. Bluetooth gomb.

## 1. Ábra: A vonalkódolvasó vezérlőszervei


A vonalkód olvasó üzemeltetésére és konfigurálására vonatkozó további részletekért tekintse meg a gyártó által kiadott dokumentációt.

# CS6080 vonalkódolvasó

---

A vonalkód olvasó beállítás a következő komponenseket tartalmazza:

- Akkumulátorral működő vonalkód olvasó
- A hálózati aljzathoz csatlakoztatott töltőállvány, amely a vonalkódolvasó tárolására és az akkumulátor töltésére szolgál.

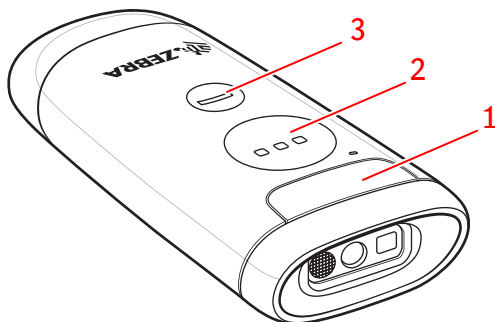

## 1. Állapot LED

A LED sárgán villog töltés közben.

A LED zöld színű, amikor a teljesen feltöltődött.

## 2. Scan (Keresés) gomb.

A vonalkód olvasóval végzett beolvasáshoz nyomja meg a Scan (Keresés) gombot, miközben az eszközt a vonalkódra irányítja.

## 3. Programozható gomb.

Nincs használatban.

## 2. Ábra: A vonalkódolvasó vezérlőszervei

A vonalkód olvasó üzemeltetésére és konfigurálására vonatkozó további részletekért tekintse meg a gyártó által kiadott dokumentációt.

# Hibaelhárítás

---

## A vonalkódolvasó Bluetooth csatlakozása megszakadt

---

Részletek	A Bluetooth LED gyorsan villog, ha megszakadt a kapcsolat a PC-vel.
Ok	A Bluetooth kapcsolaton nem párosítható a vonalkódolvasó a PC-vel.
Megoldás rövid leírása	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A Windows <b>Műveleti központ</b>-jában kattintson a Bluetooth ikonra, és válassza ki a <b>Bluetooth eszköz hozzáadása</b> pontot.</li><li>2. A vonalkódolvasó leolvasási gombjának lenyomásával ébressze fel az eszközt.</li><li>3. A vonalkódolvasón tartsa lenyomva öt másodpercig a Bluetooth gombot. A vonalkódolvasó ekkor sípol egyet, és a Bluetooth gomb gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz látható a PC számára.</li><li>4. Válassza ki a vonalkódolvasó típusnevét az észlelt Bluetooth eszközök listájából, és végezze el a párosítást. A leolvasó a párosítás megtörténtét sípolással jelzi.</li></ol>