

Brūkšninių kodų skaitytuvas

Naudojimo instrukcija

Šio vadovo aprėptis


šiam vadove yra informacija, skirta DR sistemų brūkšninių kodų skaitytuvams.

Brūkšninių kodų skaitytuvai naudojami pacientų identifikavimui MUSICA Acquisition Workstation. Brūkšninių kodų skaitytuvai pasiekiami pasirinktinai.

Brūkšnių kodų skaitytuvas CS4070

Brūkšnių kodų skaitytuvo struktūrą sudaro šie komponentai:

- Akumuliatoriumi maitinamas brūkšnių kodų skaitytuvas
- Prie maitinimo lizdo jungiamas įkrovimo stovas, skirtas laikyti brūkšnių kodų skaitytuvą ir įkrauti akumuliatorių.

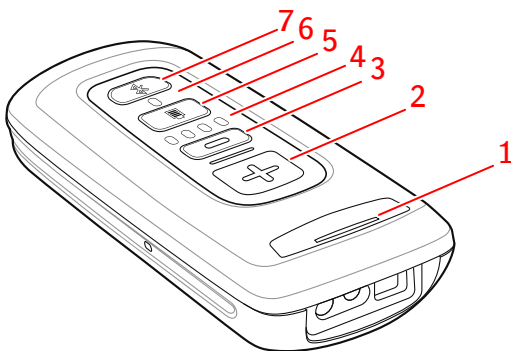

1. Būsenos LED

LED lemputė mirksi gintaro spalva, kai skaitytuvas kraunamas.

LED lemputė šviečia žalia spalva, kai skaitytuvas visiškai įkrautas.

2. Nuskaitymo mygtukas.

Norėdami nuskaityti brūkšninį kodą, nukreipkite įrenginį į brūkšninį kodą ir paspauskite nuskaitymo mygtuką.

3. Ištrynimo mygtukas.

Nenaudojamas.

4. Akumuliatoriaus įkrovimo lygio indikatoriai.

Įkrovimo metu rodomas akumuliatoriaus įkrovimo lygis.

5. Akumuliatoriaus įkrovimo lygio mygtukas.

6. „Bluetooth“ LED lemputė.

„Bluetooth“ LED lemputė sumirksi kas 4 sekundes, kai brūkšnių kodų skaitytuvas yra parengtas naudoti.

„Bluetooth“ LED lemputė greitai sumirksi kelias sekundes, kai prarandamas ryšys su USB prieigos tašku.

7. „Bluetooth“ mygtukas.


1 pav.: Brūkšnių kodų skaitytuvo valdymo priemonės

Daugiau informacijos apie brūkšnių kodų skaitytuvo naudojimą ir konfigūraciją rasite gamintojo pateiktoje dokumentacijoje.

Brūkšninių kodų skaitytuvas CS6080

Brūkšninių kodų skaitytuvo struktūrą sudaro šie komponentai:

- Akumuliatoriumi maitinamas brūkšninių kodų skaitytuvas
- Prie maitinimo lizdo jungiamas įkrovimo stovas, skirtas laikyti brūkšninių kodų skaitytuvą ir įkrauti akumuliatorių.

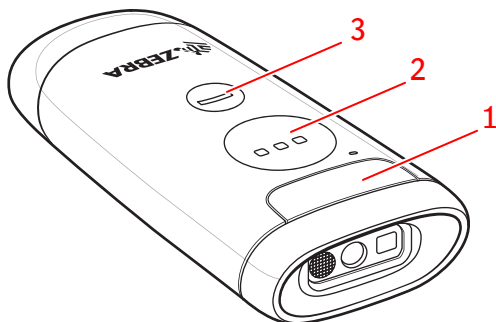

1. Būsenos LED

LED lemputė mirksi gintaro spalva, kai skaitytuvas kraunamas.

LED lemputė šviečia žalia spalva, kai skaitytuvas visiškai įkrautas.

2. Nuskaitymo mygtukas.

Norėdami nuskaityti brūkšninį kodą, nukreipkite įrenginį į brūkšninį kodą ir paspauskite nuskaitymo mygtuką.

3. Programuojamas mygtukas.

Nenaudojamas.

2 pav.: Brūkšninių kodų skaitytuvo valdymo priemonės

Daugiau informacijos apie brūkšninių kodų skaitytuvo naudojimą ir konfigūraciją rasite gamintojo pateiktoje dokumentacijoje.

Problemų sprendimas

Nutrūkęs brūkšninių kodų skaitytuvo „Bluetooth“ ryšys

Išsami informacija	„Bluetooth“ LED lemputė greitai mirksi, kai prarandamas ryšys su kompiuteriu.
Priežastis	Nepavyksta susieti brūkšninio kodo įrenginio su kompiuteriu per „Bluetooth“ ryšį.
Glaustas sprendimo aprašymas	1. „Windows“ sistemos srityje „Action center“ (veiksmų centras) spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą ir pasirinkite „Add bluetooth device“ (pridėti „Bluetooth“ įrenginį). 2. Brūkšninių kodų skaitytuve paspauskite nuskaitymo mygtuką, kad aktyvintumėte įrenginį. 3. Brūkšninių kodų skaitytuve nuspauskite „Bluetooth“ mygtuką ir palaikykite penkias sekundes. Brūkšninių kodų skaitytuvas supypsi, o „Bluetooth“ mygtukas greitai sumirksi, nurodydamas, kad įrenginį galima aptikti kompiuteryje. 4. Aptiktų „Bluetooth“ įrenginių sąrašė pasirinkite brūkšninių kodų skaitytuvo modelio pavadinimą ir susiekite įrenginį. Skaitytuvas supypsi, nurodydamas, kad yra susietas.