

Strekcodeleser

Bruksanvisning

Innhold i denne bruksanvisningen


Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om strekkodelesere på DR-systemer.

Strekkodelesere brukes til å tilrettelegge for pasientidentifikasjon på MUSICA Acquisition Workstation. Strekkodelesere er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Strekkodeleser CS4070

Strekkodeleserens oppsett inneholder følgende komponenter:

- En batteridrevet strekkodeleser
- Et ladestativ er tilkoblet strømforsyningen for å forsyne strekkodeleseren og lade batteriet.

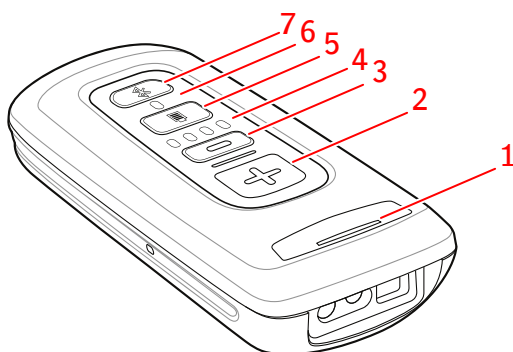

1. Status-LED

LED blinker oransje under lading.

LED lyser grønt når fulladet.

2. Skanneknapp.

Skann en strekkode ved å trykke på skanneknappen mens du peker enheten på en strekkode.

3. Slett-knapp.

Ikke i bruk.

4. Indikatorer for batterinivået.

Batterinivået vises under lading.

5. Knapp for batterinivå.

6. Bluetooth-LED.

Bluetooth-LED blinker hvert 4. sekund når strekkodeleseren er klar til bruk.

Bluetooth-LED blinker raskt i et par sekunder når den har mistet forbindelsen med USB-tilgangspunktet.

7. Bluetooth-knapp.


Figur 1: Driftskontroller for strekkodeleseren

Du finner mer informasjon om drift og konfigurasjon av strekkodeleseren i dokumentasjonen fra av produsenten.

Strekkodeleser CS6080

Strekkodeleserens oppsett inneholder følgende komponenter:

- En batteridrevet strekkodeleser
- Et ladestativ er tilkoblet strømforsyningen for å forsyne strekkodeleseren og lade batteriet.

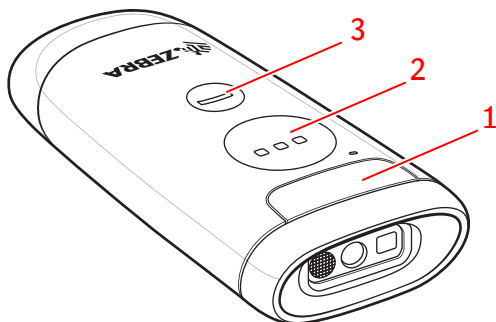

1. Status-LED

LED blinker oransje under lading.

LED lyser grønt når fulladet.

2. Skanneknapp.

Skann en strekkode ved å trykke på skanneknappen mens du peker enheten på en strekkode.

3. Programmerbar knapp.

Ikke i bruk.

Figur 2: Driftskontroller for strekkodeleseren

Du finner mer informasjon om drift og konfigurasjon av strekkodeleseren i dokumentasjonen fra produsenten.

Feilsøking

Bluetooth-tilkoblingen til strekkodeleseren er brutt

Detaljer	Bluetooth-LED blinker raskt når en har mistet forbindelse med datamaskinen.
Årsak	Bluetooth-tilkoblingen mislykkes i å pare strekkodeenheten med datamaskinen.
Kortfattet løsning	<ol style="list-style-type: none">1. I handlingscenteret i Windows, klikk på Bluetooth-ikonet og velg Legg til Bluetooth-enhet.2. På strekkodeleseren, trykk på skanneknappen for å vekke enheten.3. På strekkodeleseren, trykk og hold inne Bluetooth-knappen i fem sekunder. Strekkodeleseren avgir pipelyder og Bluetooth-knappen blinker raskt for å indikere at enheten kan oppdages av datamaskinen.4. Velg modellnavnet til strekkodeleseren fra listen over oppdagede Bluetooth-enheter, og par den. Skanneren avgir pipelyder for å indikere at den er parett.