

Viivakoodinlukija

Käyttöohje

Tämän ohjekirjan laajuus


Tämä ohjekirja sisältää tietoa DR-järjestelmien viivakoodinlukijoille.

Viivakoodinlukijoilla mahdollistetaan potilaan tunnistaminen MUSICA Acquisition Workstation -työasemassa. Viivakoodinlukijat ovat saatavilla lisävarusteena.

Viivakoodinlukija CS4070

Viivakoodinlukijajärjestelmä sisältää seuraavat komponentit:

- Akkukäyttöinen viivakoodinlukija
- Pistorasiaan liitettävä latausteline, jota käytetään viivakoodinlukijan säilyttämiseen ja akun lataamiseen.

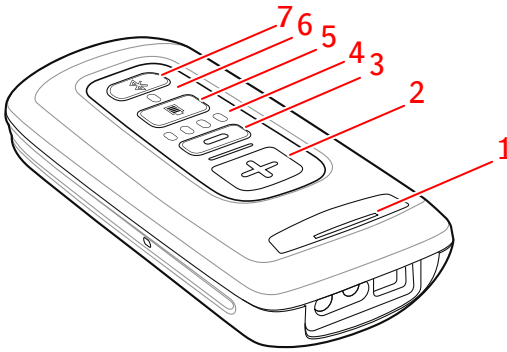

- 1. Tilan LED-merkkivalo**
LED-merkkivalo vilkkuu oranssina, kun akkua ladataan.
LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.
- 2. Lukupainike.**
Lue viivakoodi painamalla lukupainiketta, kun lukija osoittaa viivakoodia kohti.
- 3. Poistopainike.**
Ei käytössä.
- 4. Akun varaustilan ilmaisimet.**
Akun varaustila on näkyvässä latauksen aikana.
- 5. Akun varaustilan painike.**
- 6. Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo.**
Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu 4 sekunnin välein, kun viivakoodinlukija on käyttövalmis.
Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti muutaman sekunnin välein, jos yhteys USB-tukiasemaan on katkennut.
- 7. Bluetooth-yhteyden painike.**


Kuva 1: Viivakoodinlukijan käyttöohjaimet

Katso viivakoodinlukijan käyttöä koskevat tarkemmat tiedot sen valmistajan toimittamista asiakirjoista.

Viivakoodinlukija CS6080

Viivakoodinlukijajärjestelmä sisältää seuraavat komponentit:

- Akkukäyttöinen viivakoodinlukija
- Pistorasiaan liitettävä latausteline, jota käytetään viivakoodinlukijan säilyttämiseen ja akun lataamiseen.

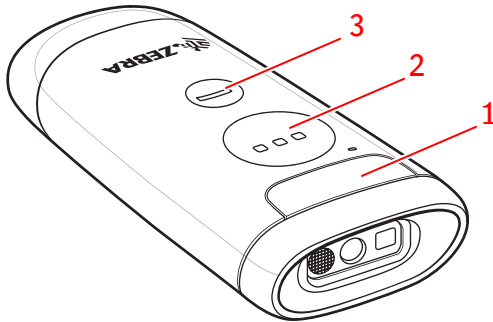

- 1.** Tilan LED-merkkivalo
LED-merkkivalo vilkkuu oranssina, kun akkua ladataan.
LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.
- 2.** Lukupainike.
Lue viivakoodi painamalla lukupainiketta, kun lukija osoittaa viivakoodia kohti.
- 3.** Ohjelmoitava painike.
Ei käytössä.

Kuva 2: Viivakoodinlukijan käyttöohjaimet

Katso viivakoodinlukijan käyttöä koskevat tarkemmat tiedot sen valmistajan toimittamista asiakirjoista.

Ongelmanratkaisu

Viivakoodinlukijan Bluetooth-liitäntä on rikki

Tiedot	Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti, jos yhteys tietokoneeseen on katkennut.
Syy	Bluetooth-yhteys ei onnistu pariliittämään viivakoodinlukijaa tietokoneeseen.
Ratkaisu lyhyesti	<ol style="list-style-type: none">1. Napsauta Windowsin toimintakeskuksessa Bluetooth-kuvaiketta ja valitse lisää Bluetooth-laite.2. Herätä viivakoodinlukija painamalla sen lukupainiketta.3. Paina viivakoodinlukijan Bluetooth-painiketta ja pidä se painettuna viisi sekuntia. Viivakoodinlukija piippaa ja Bluetooth-painike vilkkuu nopeasti merkinä siitä, että laite on tietokoneen löydettävissä.4. Valitse viivakoodinlukijan mallinimi löydettyjen Bluetooth-laitteiden luettelosta ja muodosta pariliitos. Lukija piippaa merkinä pariliitoksesta.