

バーコードリーダー

ユーザーマニュアル

このマニュアルの目的


このマニュアルには、DR システムのバーコードリーダーに関する情報が含まれています。

バーコードリーダーは、MUSICA Acquisition Workstation で患者の識別を容易にするために使用されます。バーコードリーダーはオプションとして利用できます。

バーコードリーダー CS4070

バーコードリーダーのセットアップには、次のコンポーネントが含まれます。

- バッテリー給電式バーコードリーダー
- コンセント接続タイプの充電スタンド(バーコードリーダーの収納とバッテリーの充電ができる)

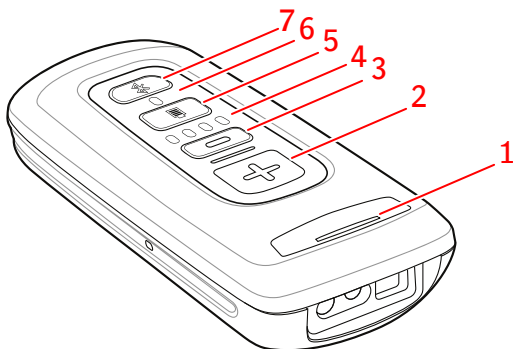

1. ステータス LED

充電中は LED がオレンジ色に点滅します。

満充電されると LED が緑色に点灯します。

2. Scan [スキャン] ボタン。

バーコードをスキャンするには、デバイスをバーコードに向けてスキャンボタンを押します。

3. [削除]ボタン。

未使用。

4. バッテリーレベルインジケーター。

充電中はバッテリーレベルが表示されます。

5. バッテリーレベルボタン。

6. Bluetooth LED。

バーコードリーダーが動作可能な状態になると、Bluetooth LED が 4 秒ごとに点滅します。

USB アクセスポイントへの接続が失われると、Bluetooth LED が数秒間速く点滅します。

7. Bluetooth ボタン。

図 1: バーコードリーダーの操作コントロール


4 | バーコードリーダー | バーコードリーダー CS4070

バーコードリーダーの操作と構成の詳細については、製造元が提供する文書を参照してください。

バーコードリーダー CS6080

バーコードリーダーのセットアップには、次のコンポーネントが含まれます。

- バッテリー給電式バーコードリーダー
- コンセント接続タイプの充電スタンド(バーコードリーダーの収納とバッテリーの充電ができる)

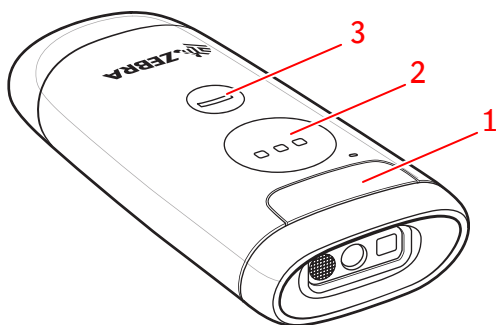

1. ステータス LED

充電中は LED がオレンジ色に点滅します。

満充電されると LED が緑色に点灯します。

2. Scan [スキャン] ボタン。

バーコードをスキャンするには、デバイスをバーコードに向けてスキャンボタンを押します。

3. プログラム可能なボタン。

未使用。

図 2: バーコードリーダーの操作コントロール

バーコードリーダーの操作と構成の詳細については、製造元が提供する文書を参照してください。

問題解決

バーコードリーダーの Bluetooth 接続が切断されました

詳細	PC との接続が失われると、Bluetooth LED が高速で点滅します。
原因	Bluetooth 接続で、バーコードデバイスを PC とペアリングできません。
簡単な解決策	<ol style="list-style-type: none">1. Windows アクションセンターで、Bluetooth アイコンをクリックし、Bluetooth デバイスの追加を選択します。2. バーコードリーダーで、スキャンボタンを押してデバイスを復帰させます。3. バーコードリーダーで、Bluetooth ボタンを 5 秒間長押しします。バーコードリーダーがビープ音を鳴らし、Bluetooth ボタンがすばやく点滅し、PC がデバイスを検出できることを示します。4. 検出された Bluetooth デバイスのリストからバーコードリーダーのモデル名を選択し、ペアリングします。ペアリングされたことを示すビープ音がスキャナーから鳴ります。