

Cititor de coduri de bare

Ghidul utilizatorului

Scopul acestui manual


Prezentul manual conține informații privind cititoarele de coduri de bare ale sistemelor de RD.

Cititoarele de coduri de bare se utilizează pentru facilitarea identificării pacienților pe MUSICA Acquisition Workstation Cititoarele de coduri de bare sunt disponibile opțional.

Cititor de coduri de bare CS4070

Ansamblul cititorului de coduri de bare include următoarele componente:

- Cititor de coduri de bare cu baterie
- Punct de încărcare conectat la priza electrică pentru păstrarea cititorului de coduri de bare și încărcarea bateriei.

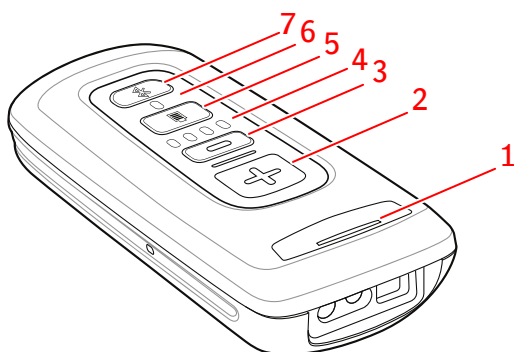

1. LED de stare

LED-ul galben se aprinde intermitent în timpul încărcării.

LED-ul verde este aprins continuu când bateria este complet încărcată.

2. Buton de scanare.

Pentru a scana un cod de bare, apăsați butonul de scanare cu dispozitivul orientat spre un cod de bare.

3. Buton de ștergere.

Nu se folosește.

4. Indicatori de încărcare a bateriei.

Nivelul de încărcare al bateriei este indicat în timpul încărcării.

5. Buton pentru nivelul de încărcare al bateriei.

6. LED Bluetooth.

LED-ul Bluetooth se aprinde intermitent o dată la 4 secunde când cititorul de coduri de bare este gata de funcționare.

LED-ul Bluetooth se aprinde intermitent rapid timp de câteva secunde când s-a deconectat de la punctul de acces USB.

7. Buton Bluetooth.


Figura 1: Comenzile cititorului de coduri de bare

Pentru detalii suplimentare despre operarea și configurarea cititorului de coduri de bare, consultați documentația furnizată de producătorul acestuia.

Cititor de coduri de bare CS6080

Ansamblul cititorului de coduri de bare include următoarele componente:

- Cititor de coduri de bare cu baterie
- Punct de încărcare conectat la priza electrică pentru păstrarea cititorului de coduri de bare și încărcarea bateriei.

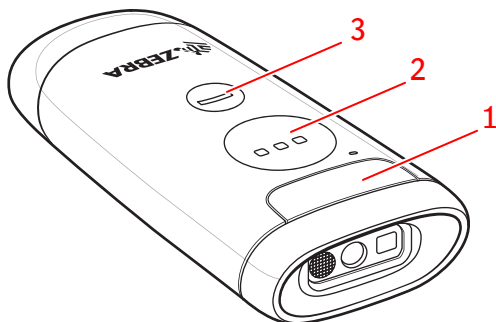

1. LED de stare

LED-ul galben se aprinde intermitent în timpul încărcării.

LED-ul verde este aprins continuu când bateria este complet încărcată.

2. Buton de scanare.

Pentru a scana un cod de bare, apăsați butonul de scanare cu dispozitivul orientat spre un cod de bare.

3. Buton programabil.

Nu se folosește.

Figura 2: Comenzile cititorului de coduri de bare

Pentru detalii suplimentare despre operarea și configurarea cititorului de coduri de bare, consultați documentația furnizată de producătorul acestuia.

Remedierea problemelor

Conexiunea Bluetooth a cititorului de coduri de bare este întreruptă

Detalii	LED-ul Bluetooth se aprinde intermitent rapid când dispozitivul s-a deconectat de la computer.
Cauză	Conexiunea Bluetooth nu a cuplat cititorul de coduri de bare cu computerul.
Soluție rapidă	1. Din Centrul de acțiune Windows, faceți clic pe pictograma Bluetooth și selectați Adăugare dispozitiv Bluetooth. 2. Apăsați butonul de scanare al cititorului de coduri de bare pentru a-l activa. 3. Apăsați continuu cinci secunde butonul Bluetooth al cititorului de coduri de bare. Cititorul de coduri de bare emite un semnal sonor, iar butonul Bluetooth se aprinde intermitent rapid indicând că dispozitivul poate fi descoperit de computer. 4. Selectați numele modelului cititorului de coduri de bare din lista de dispozitive Bluetooth descoperite și cuplați. Scannerul emite un semnal sonor pentru a indica cuplarea.