

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

คู่มือผู้ใช้

ขอบเขตของคู่มือนี้


คู่มือนี้มีข้อมูลสำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดในระบบ DR

เครื่องอ่านบาร์โค้ดใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการระบุตัวผู้ป่วยใน MUSICA Acquisition Workstation
เครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์เสริม

เครื่องอ่านบาร์โค้ด CS4070

ชุดอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดใส่แบตเตอรี่
- แท่นชาร์จที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อใช้วางเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมชาร์จแบตเตอรี่

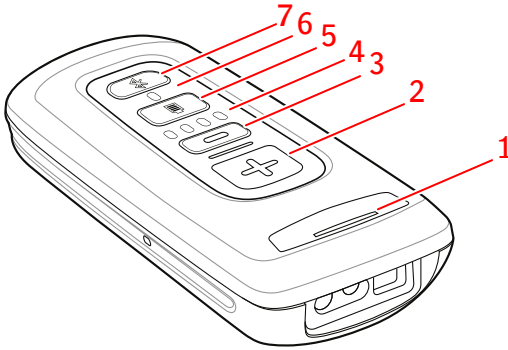

1. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีส้มอำพันขณะชาร์จไฟ

ไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็ม

2. ปุ่มสแกน

ในการสแกนบาร์โค้ด ให้กดปุ่มสแกนขณะถืออุปกรณ์ไปที่บาร์โค้ด

3. ปุ่มลบ

ไม่ได้ใช้งาน

4. ตัวบอกระดับแบตเตอรี่

บอกระดับแบตเตอรี่ขณะชาร์จ

5. ปุ่มระดับแบตเตอรี่

6. ไฟ LED บลูทูธ

ไฟ LED บลูทูธจะกะพริบทุก 4 วินาทีเมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมทำงาน

ไฟ LED บลูทูธจะกะพริบถี่เป็นเวลาสองถึงสามวินาทีเมื่อจัดการเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานแบบ USB

7. ปุ่มบลูทูธ


รูปภาพ 1: ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการกำหนดค่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดในเอกสารประกอบการใช้งานของผู้ผลิต

เครื่องอ่านบาร์โค้ด CS6080

ชุดอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดใส่แบตเตอรี่
- แท่นชาร์จที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมชาร์จแบตเตอรี่

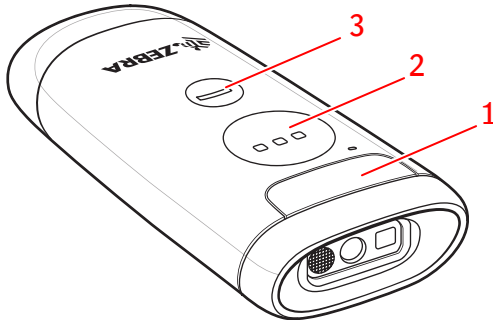

1. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีส้มอำพันขณะชาร์จไฟ

ไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็ม

2. ปุ่มสแกน

ในการสแกนบาร์โค้ด ให้กดปุ่มสแกนขณะถืออุปกรณ์ไปทีบาร์โค้ด

3. ปุ่มตั้งโปรแกรม

ไม่ได้ใช้งาน

รูปภาพ 2: ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการกำหนดค่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดในเอกสารประกอบการใช้งานของผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

การเชื่อมต่อบลูทูธของเครื่องอ่านบาร์โค้ดถูกตัด

รายละเอียด	ไฟ LED บลูทูธจะกะพริบถี่ๆ เมื่อตัดการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
สาเหตุ	การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดกับคอมพิวเตอร์ได้
วิธีแก้ไข	<ol style="list-style-type: none">1. ในหน้าต่าง ศูนย์การดำเนินการ ให้คลิกไอคอนบลูทูธแล้วเลือก เพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ2. กดปุ่มสแกนบนเครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อปลุกอุปกรณ์3. กดปุ่มบลูทูธบนเครื่องอ่านบาร์โค้ดค้างไว้ห้าวินาที เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะส่งเสียงบี๊ปและปุ่มบลูทูธจะกะพริบถี่ๆ เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์พร้อมให้คอมพิวเตอร์ค้นหา4. เลือกชื่อรุ่นของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากรายการอุปกรณ์บลูทูธที่หาพบ แล้วจับคู่ เครื่องอ่านจะส่งเสียงบี๊ปเพื่อแสดงว่าจับคู่แล้ว