

Leitor de código de barras

Manual do utilizador

Âmbito deste manual


Este manual contém informações sobre leitores de código de barras em sistemas DR.

Os leitores de código de barras são usados para facilitar a identificação dos pacientes na MUSICA Acquisition Workstation. Os leitores de código de barras estão disponíveis enquanto opção.

Leitor de códigos de barras CS4070

A configuração do leitor de código de barras inclui os componentes seguintes:

- Um leitor de código de barras alimentado a bateria
- Um suporte de carregamento ligado a uma fonte de alimentação que serve de suporte para o leitor de código de barras e para carregar a bateria.

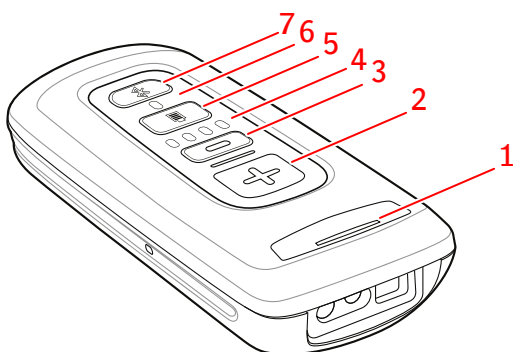

1. LED de estado

O LED pisca a âmbar enquanto carrega.

O LED surge a verde contínuo quando está totalmente carregado.

2. Botão Scan (Procurar).

Para ler um código de barras, prima o botão de leitura enquanto aponta o dispositivo para um código de barras.

3. Botão eliminar.

Não usado.

4. Indicadores do nível da bateria.

O nível da bateria é indicado durante o carregamento.

5. Botão do nível da bateria.

6. LED bluetooth.

O LED bluetooth pisca a cada 4 segundos quando o leitor de código de barras está pronto para o funcionamento.

O LED bluetooth pisca rápido durante alguns segundos quando tiver perdido a ligação ao ponto de acesso da USB.

7. Botão Bluetooth.


Figura 1: Controlos da operação do leitor de código de barras

Para mais informações acerca da operação e configuração do leitor de código de barras, consulte a documentação fornecida pelo fabricante.

Leitor de códigos de barras CS6080

A configuração do leitor de código de barras inclui os componentes seguintes:

- Um leitor de código de barras alimentado a bateria
- Um suporte de carregamento ligado a uma fonte de alimentação que serve de suporte para o leitor de código de barras e para carregar a bateria.

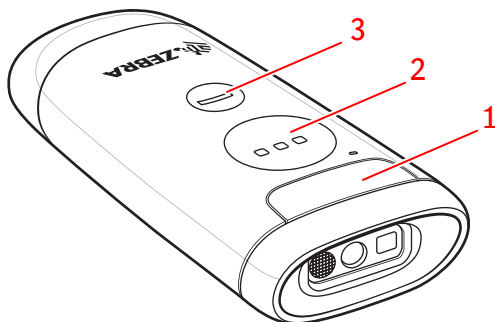

1. LED de estado

O LED pisca a âmbar enquanto carrega.

O LED surge a verde contínuo quando está totalmente carregado.

2. Botão Scan (Procurar).

Para ler um código de barras, prima o botão de leitura enquanto aponta o dispositivo para um código de barras.

3. Botão programável.

Não usado.

Figura 2: Controlos da operação do leitor de código de barras

Para mais informações sobre a operação e a configuração do leitor de código de barras, consulte a documentação fornecida pelo fabricante.

Resolução de problemas

Falha na ligação Bluetooth do leitor de códigos de barras

Detalhes	O LED Bluetooth apresenta uma intermitência rápida se a ligação ao PC se tiver perdido.
Causa	A ligação Bluetooth não consegue emparelhar o dispositivo de código de barras com o PC.
Solução rápida	<ol style="list-style-type: none">1. Nas janelas Centro de ação, clique no ícone do Bluetooth e selecione Adicionar dispositivo Bluetooth.2. No leitor de códigos de barras, prima o botão de leitura para reativar o dispositivo.3. No leitor de códigos de barras, mantenha premido o botão de Bluetooth durante cinco segundos. O leitor de códigos de barras emite um bipe e o botão de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a indicar que o dispositivo pode ser encontrado pelo PC.4. Selecione o nome do modelo do leitor de códigos de barras a partir da lista de dispositivos Bluetooth encontrados e emparelhe. O scanner emite um bipe a indicar que o emparelhamento foi executado.