

Čtečka čárového kódu

Uživatelská příručka

Rozsah této příručky


Tato příručka obsahuje informace pro čtečky čárových kódů v systémech DR.

Čtečky čárových kódů se používají k usnadnění identifikace pacienta v pracovní stanici MUSICA Acquisition Workstation. Čtečky čárových kódů jsou k dispozici jako volitelné vybavení.

Čtečka čárových kódů CS4070

Sestava čtečky čárového kódu obsahuje následující součásti:

- Čtečka čárového kódu s bateriovým napájením
- Nabíjecí stojan pro uložení čtečky čárového kódu a nabíjení baterie připojený k síťové zásuvce.

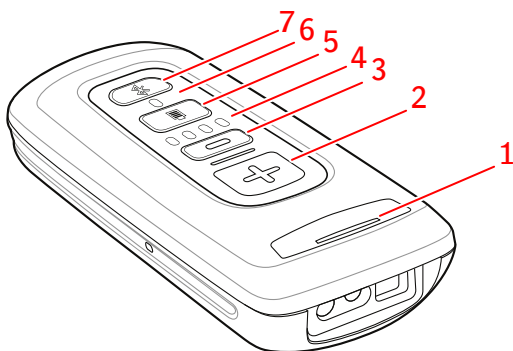

1. Stavový LED indikátor

LED indikátor během nabíjení bliká jantarovou barvou.

Při plném nabití svítí LED indikátor trvale zelenou barvou.

2. Tlačítko Scan (Snímat).

Chcete-li načíst čárový kód, zaměřte přístroj na čárový kód a stiskněte tlačítko Snímat.

3. Tlačítko Smazat.

Nevyužito.

4. Indikátory stavu nabití baterií.

Během nabíjení se zobrazuje úroveň nabití baterie.

5. Tlačítko úrovně nabití.

6. LED indikátor rozhraní Bluetooth.

Je-li čtečka čárového kódu připravena k provozu, LED indikátor Bluetooth blikne každé 4 sekundy.

Při ztrátě spojení s přístupovým bodem USB bude LED indikátor Bluetooth rychle blikat po dobu několika sekund.

7. Tlačítko Bluetooth.


Obrázek 1: Ovládací prvky čtečky čárového kódu

Podrobnosti o provozu a konfiguraci čtečky čárového kódu naleznete v dokumentaci od výrobce.

Čtečka čárových kódů CS6080

Sestava čtečky čárového kódu obsahuje následující součásti:

- Čtečka čárového kódu s bateriovým napájením
- Nabíjecí stojan pro uložení čtečky čárového kódu a nabíjení baterie připojený k síťové zásuvce.

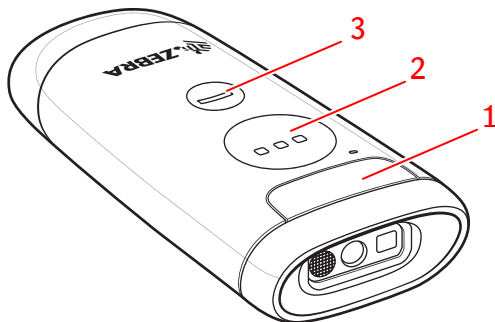

1. Stavový LED indikátor

LED indikátor během nabíjení bliká jantarovou barvou.

Při plném nabití svítí LED indikátor trvale zelenou barvou.

2. Tlačítko Scan (Snímat).

Chcete-li načíst čárový kód, zaměřte přístroj na čárový kód a stiskněte tlačítko Snímat.

3. Programovatelné tlačítko.

Nevyužito.

Obrázek 2: Ovládací prvky čtečky čárového kódu

Podrobnosti o provozu a konfiguraci čtečky čárového kódu naleznete v dokumentaci od výrobce.

Řešení problémů

Připojení Bluetooth čtečky čárových kódů je přerušeno

Podrobnosti	Při ztrátě spojení s počítačem bude LED indikátor Bluetooth rychle blikat.
Příčina	Nedaří se spárovat čtečku čárových kódů s počítačem pomocí připojení Bluetooth.
Rychlé řešení	<ol style="list-style-type: none">1. V Centru akcí systému Windows klikněte na ikonu Bluetooth a vyberte možnost Přidat zařízení Bluetooth.2. Stisknutím tlačítka pro skenování na čtečce čárových kódů zařízení probudíte.3. Na čtečce čárových kódů po dobu pěti sekund stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth. Čtečka čárových kódů pípne a tlačítko Bluetooth se rychle rozbliká, což znamená, že zařízení lze zjistit pomocí počítače.4. Ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth vyberte název modelu čtečky čárových kódů a proveďte spárování. Čtečka potvrdí spárování pípnutím.