

Lettore di codice a barre

Manuale utente

Finalità del manuale


Questo manuale contiene informazioni per i lettori di codice a barre dei sistemi DR.

I lettori di codice a barre servono per agevolare l'identificazione dei pazienti sulla MUSICA Acquisition Workstation. I lettori di codice a barre sono disponibili come opzione.

Lettore di codice a barre CS4070

La configurazione del lettore di codici a barre include i seguenti componenti:

- Un lettore di codici a barre alimentato a batteria.
- Un supporto di ricarica, collegato a una presa di corrente, per riporre il lettore di codici a barre e ricaricarne la batteria.

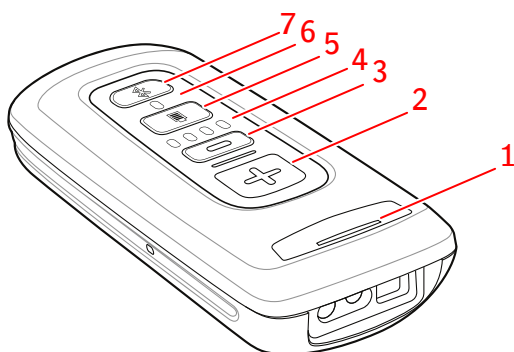

1. LED di stato

Il LED emette una luce giallo ambra lampeggiante durante la carica.

Il LED emette una luce verde fissa quando il lettore è completamente carico.

2. Pulsante di scansione.

Per eseguire la scansione di un codice a barre, premere il pulsante di scansione puntando il dispositivo sul codice a barre desiderato.

3. Pulsante di eliminazione.

Non utilizzato.

4. Indicatori del livello di carica della batteria.

Durante la carica, viene indicato il livello di carica della batteria.

5. Pulsante del livello di carica della batteria.

6. LED del Bluetooth.

Il LED del Bluetooth lampeggia ogni 4 secondi quando il lettore di codici a barre è pronto per essere utilizzato.

Il LED del Bluetooth lampeggia velocemente per alcuni secondi in caso di perdita della connessione al punto di accesso USB.

7. Pulsante del Bluetooth.


Figura 1: Comandi per il funzionamento del lettore di codici a barre

Per ulteriori dettagli sul funzionamento e sulla configurazione del lettore di codici a barre, consultare la documentazione fornita dal produttore.

Lettore di codice a barre CS6080

La configurazione del lettore di codici a barre include i seguenti componenti:

- Un lettore di codici a barre alimentato a batteria.
- Un supporto di ricarica, collegato a una presa di corrente, per riporre il lettore di codici a barre e ricaricarne la batteria.

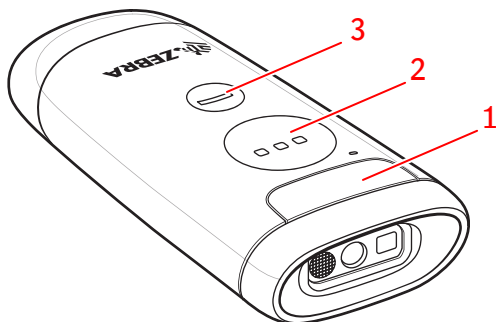

1. LED di stato

Il LED emette una luce giallo ambra lampeggiante durante la carica.

Il LED emette una luce verde fissa quando il lettore è completamente carico.

2. Pulsante di scansione.

Per eseguire la scansione di un codice a barre, premere il pulsante di scansione puntando il dispositivo sul codice a barre desiderato.

3. Pulsante programmabile.

Non utilizzato.

Figura 2: Comandi per il funzionamento del lettore di codici a barre

Per ulteriori dettagli sul funzionamento e sulla configurazione del lettore di codice a barre, consultare la documentazione fornita dal produttore.

Risoluzione dei problemi

Interruzione della connessione Bluetooth del lettore di codice a barre

Dettagli	Il LED del Bluetooth lampeggia velocemente in caso di interruzione della connessione al PC.
Causa	La connessione Bluetooth non riesce ad associare il lettore di codice a barre con il PC.
Soluzione rapida	1. Nel centro di azione Windows, fare clic sull'icona del Bluetooth e selezionare aggiungi dispositivo Bluetooth. 2. Sul lettore di codice a barre, premere il pulsante di scansione per attivare il dispositivo. 3. Tenere premuto il pulsante Bluetooth del lettore di codici a barre per cinque secondi. Il lettore di codice a barre emette un segnale acustico e il pulsante Bluetooth lampeggia rapidamente indicando che il dispositivo è rilevabile dal PC. 4. Selezionare il nome del modello del lettore di codice a barre dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati e associarlo. Lo scanner emette un segnale acustico per indicare l'avvenuto associazione.