

Čítačka čiarových kódov

Užívateľská príručka

Rozsah tejto príručky


Táto príručka obsahuje informácie o čítačkách čiarových kódov v systémoch DR.

Čítačky čiarových kódov sa používajú na uľahčenie identifikácie pacientov na pracovnej stanici MUSICA Acquisition Workstation. Čítačky čiarových kódov sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Čítačka čiarových kódov CS4070

Zostava čítačky čiarových kódov zahŕňa tieto komponenty:

- Čítačka čiarových kódov napájaná batériou
- Nabíjací stojan pripojený do elektrickej zásuvky na uloženie čítačky čiarových kódov a nabíjanie batérie.

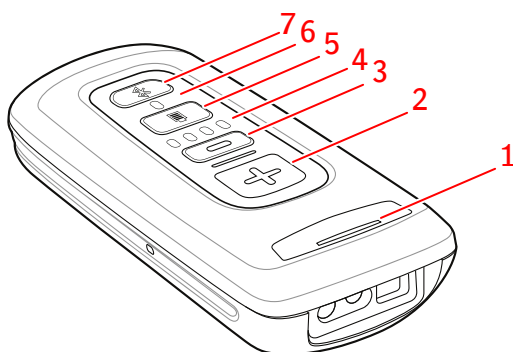

1. LED dióda stavu

Počas nabíjania bliká žltá kontrolka LED.

Pri plnom nabití svieti LED dióda na zeleno.

2. Tlačidlo skenovania.

Ak chcete naskenovať čiarový kód, stlačte tlačidlo skenovania a zároveň nasmerujte zariadenie na čiarový kód.

3. Tlačidlo odstránenia.

Nepoužíva sa.

4. Indikátory úrovne nabitia batérie.

Počas nabíjania sa zobrazuje úroveň nabitia batérie.

5. Tlačidlo úrovne nabitia batérie.

6. LED dióda Bluetooth.

LED dióda Bluetooth bliká každé 4 sekundy, keď je čítačka čiarových kódov pripravená na prevádzku.

LED dióda Bluetooth niekoľko sekúnd rýchlo bliká, keď stratí spojenie k prístupovému bodu USB.

7. Tlačidlo Bluetooth.


Obrázok 1: Ovládacie prvky čítačky čiarových kódov

Podrobnejšie informácie o obsluhu a konfigurácii čítačky čiarových kódov nájdete v dokumentácii dodanej výrobcom.

Čítačka čiarových kódov CS6080

Zostava čítačky čiarových kódov zahŕňa tieto komponenty:

- Čítačka čiarových kódov napájaná batériou
- Nabíjací stojan pripojený do elektrickej zásuvky na uloženie čítačky čiarových kódov a nabíjanie batérie.

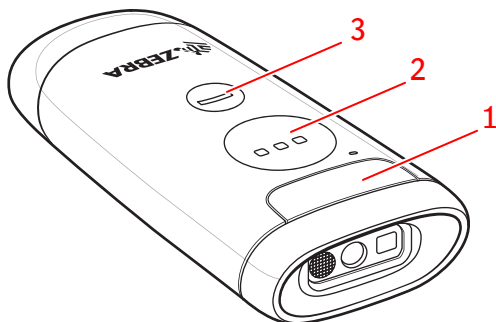

1. LED dióda stavu

Počas nabíjania bliká žltá kontrolka LED.

Pri plnom nabití svieti LED dióda na zeleno.

2. Tlačidlo skenovania.

Ak chcete naskenovať čiarový kód, stlačte tlačidlo skenovania a zároveň nasmerujte zariadenie na čiarový kód.

3. Programovateľné tlačidlo.

Nepoužíva sa.

Obrázok 2: Ovládacie prvky čítačky čiarových kódov

Podrobnejšie informácie o obsluhu a konfigurácii čítačky čiarových kódov nájdete v dokumentácii dodanej výrobcom.

Riešenie problémov

Pripojenie Bluetooth čítačky čiarových kódov je nefunkčné

Detaily	LED dióda Bluetooth rýchlo bliká, keď stratí spojenie s počítačom.
Príčina	Bluetooth nedokáže spárovať zariadenie čítačky čiarových kódov s počítačom.
Stručné riešenie	1. V akčnom centre systému Windows kliknite na ikonu Bluetooth a vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth. 2. Na čítačke čiarových kódov stlačte tlačidlo skenovania, čím zariadenie prebudíte. 3. Na čítačke čiarových kódov stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth päť sekúnd. Čítačka čiarových kódov pípne a tlačidlo Bluetooth začne rýchlo blikáť, čím signalizuje, že zariadenie je zistiteľné počítačom. 4. Vyberte názov modelu čítačky čiarových kódov zo zoznamu objavených zariadení Bluetooth a čítačku spárujte. Skener vydá zvukový signál, ktorý signalizuje úspešné spárovanie.