

Strekkodsläsare

Bruksanvisning

Bruksanvisningens omfattning


Den här bruksanvisningen innehåller information för streckkodsläsare på DR-system.

Streckkodsläsare används för att underlätta patientidentifiering på MUSICA Acquisition Workstation. Streckkodsläsare är tillgängliga som tillval.

Strekkodsläsare CS4070

Strekkodsläsarens konfiguration innehåller följande komponenter:

- En batteridriven strekkodsläsare
- Ett laddningsställ anslutet till eluttaget för att förvara strekkodsläsaren och ladda batteriet.

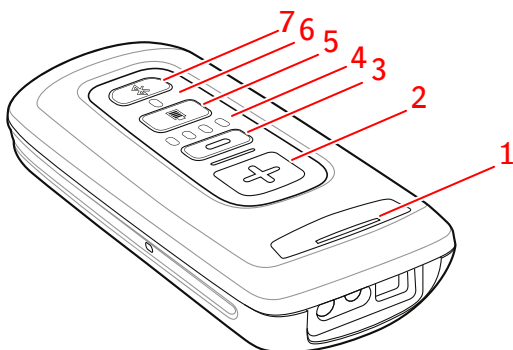

1. Statuslysdiod

Lysdioden blinkar gult under laddningen.

Lysdioden lyser med fast grönt sken när den är fulladdad.

2. Knappen Scan.

För att skanna en streckkod trycker du på skanningsknappen medan du riktar enheten mot en streckkod.

3. Knappen Ta bort.

Används inte.

4. Indikatorer för batterinivå.

Batterinivån indikeras under laddning.

5. Knapp för batterinivå.

6. Bluetooth-lysdiod.

Bluetooth-lysdioden blinkar var 4:e sekund när strekkodsläsaren är klar för användning.

Bluetooth-lysdioden blinkar snabbt i några sekunder när anslutningen till USB-åtkomstpunkten har förlorats.

7. Bluetooth-knapp.


Figur 1: Strekkodsläsarens funktionskontroller

Mer information om hur du använder och konfigurerar strekkodsläsaren finns i dokumentationen från tillverkaren.

Streckkodsläsare CS6080

Streckkodsläsarens konfiguration innehåller följande komponenter:

- En batteridriven streckkodsläsare
- Ett laddningsställ anslutet till eluttaget för att förvara streckkodsläsaren och ladda batteriet.

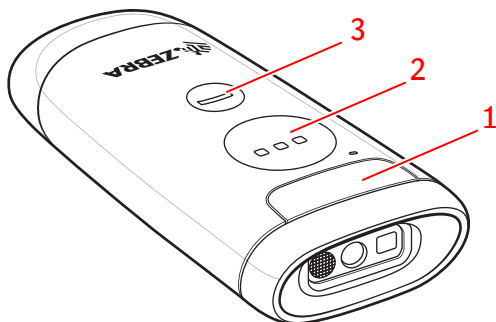

1. Statuslysdiod

Lysdioden blinkar gult under laddningen.

Lysdioden lyser med fast grönt sken när den är fulladdad.

2. Knappen Scan.

För att skanna en streckkod trycker du på skanningsknappen medan du riktar enheten mot en streckkod.

3. Programmerbar knapp.

Används inte.

Figur 2: Streckkodsläsarens funktionskontroller

Mer information om hur du använder och konfigurerar streckkodsläsaren finns i dokumentationen från tillverkaren.

Problemlösning

Strekkodsläsarens Bluetooth-anslutning har brutits

Detaljer	Bluetooth-lysdioden blinkar snabbt när anslutningen till datorn har förlorats.
Orsak	Bluetooth-anslutningen lyckas inte para strekkodsläsaren med datorn.
Snabb lösning	<ol style="list-style-type: none">1. Klicka på Bluetooth-ikonen i Windows åtgärdscenter och välj Lägg till en Bluetooth-enhet.2. Tryck på skanningsknappen på strekkodsläsaren för att aktivera enheten.3. Tryck och håll Bluetooth-knappen på strekkodsläsaren i fem sekunder. Strekkodsläsaren piper och Bluetooth-knappen blinkar snabbt för att ange att enheten kan upptäckas av datorn.4. Välj strekkodsläsarens modellnamn i listan över upptäckta Bluetooth-enheter och para. Skannern piper för att ange att den har parats.