



Odzyskiwanie obrazu

Problem: obraz jest uzyskiwany przy użyciu detektora DR, ale nie jest wyświetlany w badaniu.



OSTRZEŻENIE:

Nie wyłączaj detektora DR ani systemu RTG! Obraz zostanie utracony.

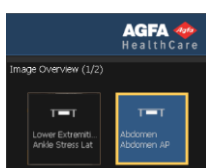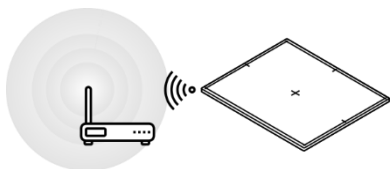


1. Sprawdź stan połączenia Wi-Fi i umieść detektor DR bliżej punktu dostępu Wi-Fi lub mobilnego aparatu RTG.

2. Wybierz inną pustą miniaturę dla tego samego detektora DR. Utwórz jedną, jeżeli nie jest dostępna żadna miniatura.

Umożliwi to systemowi odebranie brakującego obrazu z detektora.

3. Na pasku tytułu powinno zostać wyświetlone nowe badanie zawierające odzyskany obraz.

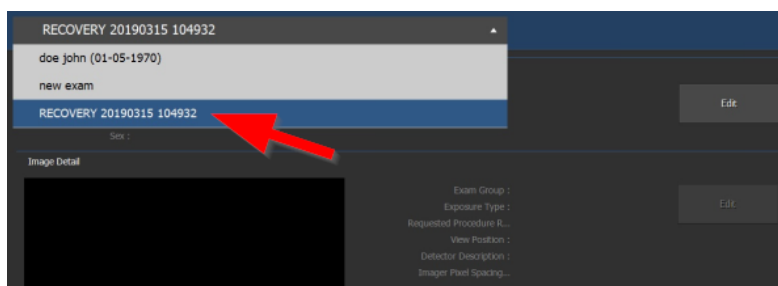

Prześlij odzyskany obraz do prawidłowego pacjenta przy użyciu przycisku **Przenieś sesję** w oknie Badanie.

Aby ponownie uruchomić stację roboczą NX, wybierz kolejno **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** i kliknij **Uruchom ponownie NX**.

4. Jeżeli obraz nie zostanie wyświetlony na stacji roboczej NX po upływie 3 minut, należy uruchomić ponownie stację roboczą NX

Aby wyłączyć detektor, wyjmij akumulator. Aby włączyć detektor, włóż akumulator.

5. Jeżeli obraz nie będzie wyświetlany w dalszym ciągu, należy ponownie uruchomić detektor.

Obrazu nie można odzyskać. Więcej informacji o problemie można uzyskać w lokalnej sieci pomocy technicznej.

Uruchamianie detektora

Nie używać ostrych przedmiotów lub długopisów/piór kulkowych do obsługi **przycisku zasilania** detektora!

Podczas uruchamiania detektora należy pozostawać poza zasięgiem **portu na podświetlonej**, który jest podłączony do stacji roboczej NX!

Odzyskiwanie obrazu

Problem: obraz jest uzyskiwany przy użyciu detektora DR, ale nie jest wyświetlany w badaniu.



OSTRZEŻENIE:

Nie wyłączaj detektora DR ani systemu RTG! Obraz zostanie utracony.




OSTRZEŻENIE:

NIE wybieraj miniatury dla innego detektora DR! Obraz zostanie utracony.




OSTRZEŻENIE:

NIE uruchamiaj ponownie stacji NX! Obraz zostanie utracony.

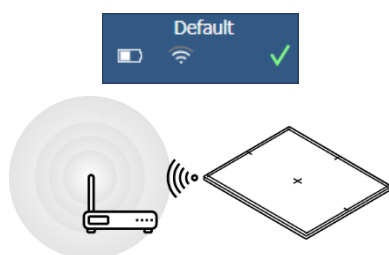

1. Sprawdź stan połączenia Wi-Fi i umieść detektor DR bliżej punktu dostępu Wi-Fi lub mobilnego aparatu RTG.

Rozpocznie to proces odzyskiwania obrazu z detektora.

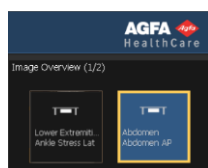

2. Odzyskany obraz powinien pojawić się jako miniatura.

Aby ponownie uruchomić stację roboczą NX, wybierz kolejno **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** i kliknij **Uruchom ponownie NX**.

3. Jeżeli obraz nie zostanie wyświetlony na stacji roboczej NX po upływie 10 minut, należy uruchomić ponownie stację roboczą NX i ponownie uruchomić detektor.

Obrazu nie można odzyskać. Więcej informacji o problemie można uzyskać w lokalnej sieci pomocy technicznej.




Odzyskiwanie obrazu

Problem: obraz jest uzyskiwany przy użyciu detektora DR, ale nie jest wyświetlany w badaniu.



OSTRZEŻENIE:

Nie wyłączaj detektora DR ani systemu RTG! Obraz zostanie utracony.

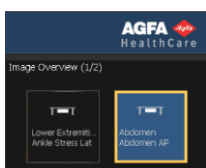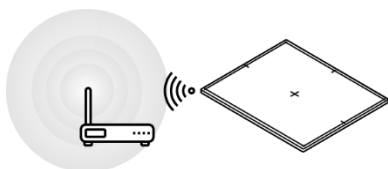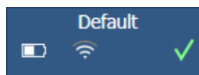


1. Sprawdź stan połączenia Wi-Fi i umieść detektor DR bliżej punktu dostępu Wi-Fi lub mobilnego aparatu RTG.

2. Wybierz inną pustą miniaturę dla tego samego detektora DR. Utwórz jedną, jeżeli nie jest dostępna żadna miniatura.

Rozpocznie to proces odzyskiwania obrazu z detektora.

3. Na pasku tytułu powinno zostać wyświetlone nowe badanie zawierające odzyskany obraz.

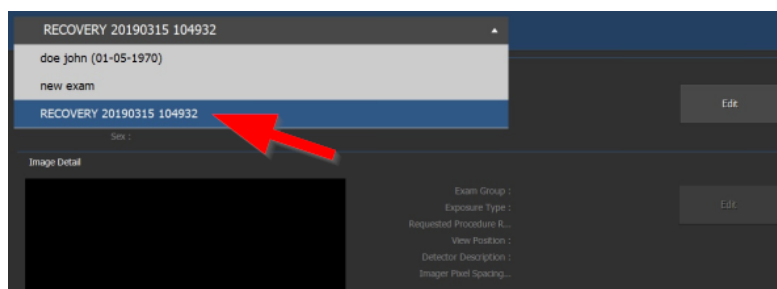

Prześlij odzyskany obraz do prawidłowego pacjenta przy użyciu przycisku **Przenieś sesję** w oknie Badanie.

Aby ponownie uruchomić stację roboczą NX, wybierz kolejno **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** i kliknij **Uruchom ponownie NX**.

4. Jeżeli obraz nie zostanie wyświetlony na stacji roboczej NX po upływie 3 minut, należy uruchomić ponownie stację roboczą NX

5. Jeżeli obraz nie będzie wyświetlany w dalszym ciągu, należy ponownie uruchomić detektor.

Obrazu nie można odzyskać. Więcej informacji o problemie można uzyskać w lokalnej sieci pomocy technicznej.

Uruchamianie detektora

Nie używać ostrych przedmiotów lub długopisów/piór kulkowych do obsługi **przycisku zasilania** detektora!