


Recuperación de la imagen

Problema: se adquiere una imagen con el detector DR, pero no se muestra en el examen.



ADVERTENCIA:

¡No apague el detector DR ni el sistema de rayos X! ¡Se perderá la imagen.

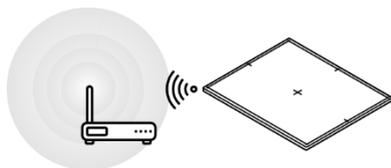


1. Compruebe el estado de la conexión Wi-Fi y acerque el detector DR al punto de acceso Wi-Fi o a la unidad de rayos X móvil.

2. Seleccione otra imagen en miniatura vacía para el mismo detector DR. Cree una si no hay ninguna disponible.

Esto permitirá al sistema recibir la imagen faltante desde el detector.

3. En la barra de título, debería aparecer un nuevo examen que contiene la imagen recuperada.

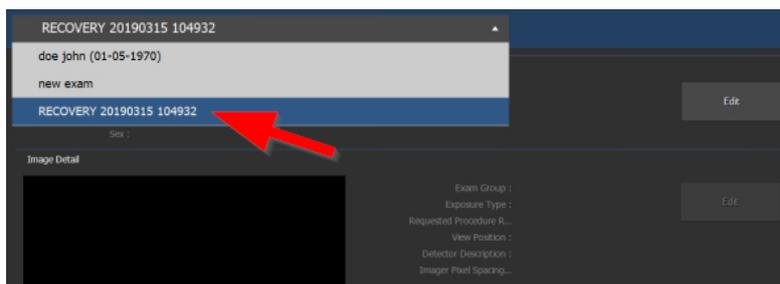

Transfiera la imagen al paciente adecuado con el botón **Transfer Session** (Transferir sesión) de la ventana Examination (Examen).

Para reiniciar NX, entre al **Centro de control de MUSICA Acquisition Workstation > NX** y haga clic en **Restart NX Completely** (Reiniciar NX completamente).

4. Si la imagen no aparece en NX tras 3 minutos, reinicie NX

Para apagar el detector, retire la batería. Para encender el detector, inserte la batería.

5. Si la imagen aún no aparece en NX, reinicie el detector.

No se puede recuperar la imagen. Póngase en contacto con la organización de servicio técnico local para investigar el problema.

Puesta en funcionamiento del detector

¡No use un objeto puntiagudo ni un bolígrafo/una pluma para operar el **botón de encendido** del detector!

¡Mientras se inicia el detector, manténgalo fuera del alcance del **puerto infrarrojo** que está conectado con la estación de trabajo NX!

Recuperación de la imagen

Problema: se adquiere una imagen con el detector DR, pero no se muestra en el examen.



ADVERTENCIA:

¡No apague el detector DR ni el sistema de rayos X! ¡Se perderá la imagen.





ADVERTENCIA:

¡NO seleccione ninguna imagen en miniatura de otro detector DR! ¡Se perderá la imagen.



ADVERTENCIA:

¡NO reinicie NX! Se perderá la imagen.

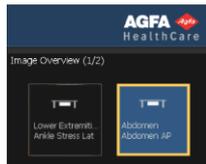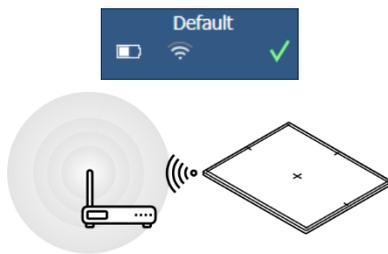

Para reiniciar NX, entre al **Centro de control de MUSICA Acquisition Workstation > NX** y haga clic en **Restart NX Completely** (Reiniciar NX completamente).

1. **Compruebe el estado de la conexión Wi-Fi y acerque el detector DR al punto de acceso Wi-Fi o a la unidad de rayos X móvil.**

Esto inicia un proceso de recuperación de imágenes desde el detector.

2. **La imagen recuperada debería aparecer en la imagen en miniatura.**

3. **Si la imagen no aparece en NX tras 10 minutos, reinicie NX y reinicie el detector.**

No se puede recuperar la imagen. Póngase en contacto con la organización de servicio técnico local para investigar el problema.


Recuperación de la imagen

Problema: se adquiere una imagen con el detector DR, pero no se muestra en el examen.



ADVERTENCIA:

¡No apague el detector DR ni el sistema de rayos X! ¡Se perderá la imagen.

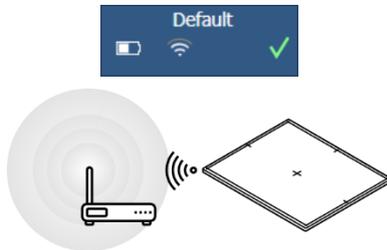


1. Compruebe el estado de la conexión Wi-Fi y acerque el detector DR al punto de acceso Wi-Fi o a la unidad de rayos X móvil.

2. Seleccione otra imagen en miniatura vacía para el mismo detector DR. Cree una si no hay ninguna disponible.

Esto inicia un proceso de recuperación de imágenes desde el detector.

3. En la barra de título, debería aparecer un nuevo examen que contiene la imagen recuperada.

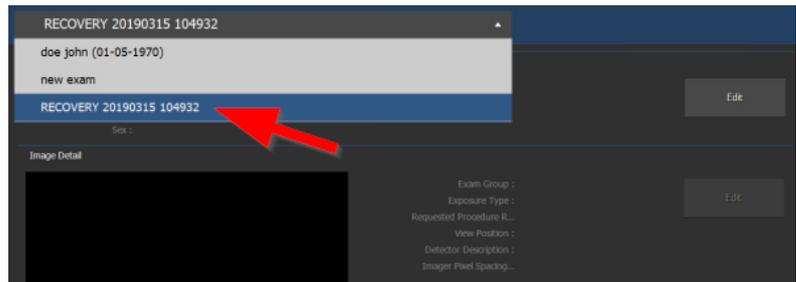

Transfiera la imagen al paciente adecuado con el botón **Transfer Session** (Transferir sesión) de la ventana Examination (Examen).

Para reiniciar NX, entre al **Centro de control de MUSICA Acquisition Workstation > NX** y haga clic en **Restart NX Completely** (Reiniciar NX completamente).

4. Si la imagen no aparece en NX tras 3 minutos, reinicie NX

5. Si la imagen aún no aparece en NX, reinicie el detector.

No se puede recuperar la imagen. Póngase en contacto con la organización de servicio técnico local para investigar el problema.

Puesta en funcionamiento del detector

¡No use un objeto puntiagudo ni un bolígrafo/una pluma para operar el **botón de encendido** del detector!