




Ανάκτηση εικόνας

Πρόβλημα: λαμβάνεται μια εικόνα με τη χρήση ενός ανιχνευτή DR αλλά δεν εμφανίζεται στην εξέταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απενεργοποιείτε τον ανιχνευτή DR ή το σύστημα ακτίνων X! Η εικόνα μπορεί να χαθεί.

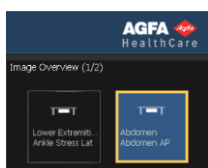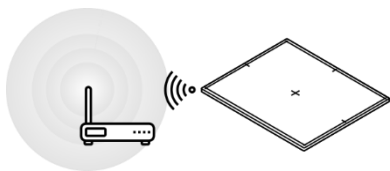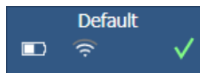


1. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης WiFi και τοποθετήστε τον ανιχνευτή DR κοντά στο σημείο πρόσβασης WiFi ή στην κινητή μονάδα ακτίνων X.

2. Επιλέξτε άλλη κενή μικρογραφία για τον ίδιο ανιχνευτή DR. Δημιουργήστε μία αν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη.

Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να λάβει την εικόνα που λείπει από τον ανιχνευτή.

3. Στη γραμμή τίτλου, πρέπει να εμφανιστεί μια νέα εξέταση που περιέχει την ανακτηθείσα εικόνα.

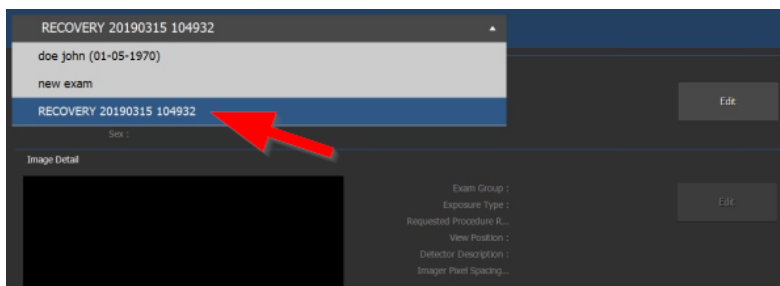

Μεταφέρετε την εικόνα στον σωστό ασθενή χρησιμοποιώντας το κουμπί **Μεταφορά συνεδρίας** στο παράθυρο Εξέταση.

Για να επανεκκινήσετε το NX, μεταβείτε στο **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** και κάντε κλικ στην επιλογή **Πλήρης επανεκκίνηση του NX**.

4. Αν δεν εμφανιστεί εικόνα στο NX μετά από 3 λεπτά, επανεκκινήστε το NX

Για να απενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής, αφαιρέστε την μπαταρία. Για να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής, εισαγάγετε την μπαταρία.

5. Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται εικόνα στο NX, επανεκκινήστε τον ανιχνευτή.

Η εικόνα δεν μπορεί να ανακτηθεί. Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό υποστήριξης για να διερευνήσετε το πρόβλημα.

Εκκίνηση του ανιχνευτή

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο ή στυλό/roller ball για να χειριστείτε το **κουμπί ενεργοποίησης** του ανιχνευτή! Ενώ εκκινείτε τον ανιχνευτή, κρατήστε τον μακριά από τη **θύρα υπερύθρων** που συνδέεται με τον σταθμό εργασίας NX!

Ανάκτηση εικόνας

Πρόβλημα: λαμβάνεται μια εικόνα με τη χρήση ενός ανιχνευτή DR αλλά δεν εμφανίζεται στην εξέταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απενεργοποιείτε τον ανιχνευτή DR ή το σύστημα ακτίνων X! Η εικόνα μπορεί να χαθεί.





ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ επιλέξετε μικρογραφία για άλλον ανιχνευτή DR! Η εικόνα μπορεί να χαθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ κάνετε επανεκκίνηση στο NX! Η εικόνα θα χαθεί.

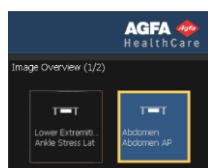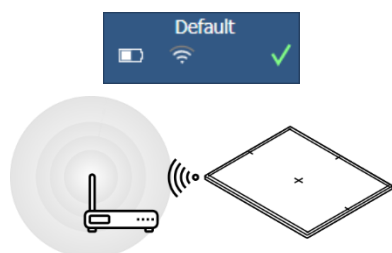

Για να επανεκκινήσετε το NX, μεταβείτε στο **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** και κάντε κλικ στην επιλογή **Πλήρης επανεκκίνηση του NX**.

1. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης WiFi και τοποθετήστε τον ανιχνευτή DR κοντά στο σημείο πρόσβασης WiFi ή στην κινητή μονάδα ακτίνων X.

Με αυτό τον τρόπο ξεκινά μια διαδικασία ανάκτησης εικόνας από τον ανιχνευτή.

2. Στη μικρογραφία θα πρέπει να εμφανιστεί η ανακτημένη εικόνα.

3. Αν δεν εμφανιστεί εικόνα στο NX μετά από 10 λεπτά, επανεκκινήστε το NX και τον ανιχνευτή.

Η εικόνα δεν μπορεί να ανακτηθεί. Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό υποστήριξης για να διερευνήσετε το πρόβλημα.



Ανάκτηση εικόνας

Πρόβλημα: λαμβάνεται μια εικόνα με τη χρήση ενός ανιχνευτή DR αλλά δεν εμφανίζεται στην εξέταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απενεργοποιείτε τον ανιχνευτή DR ή το σύστημα ακτίνων X! Η εικόνα μπορεί να χαθεί.

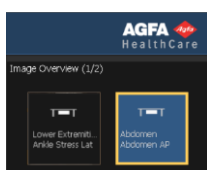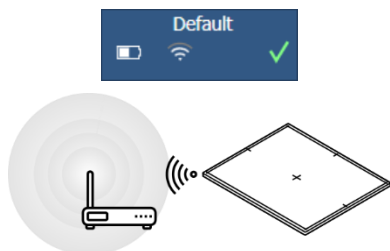


1. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης WiFi και τοποθετήστε τον ανιχνευτή DR κοντά στο σημείο πρόσβασης WiFi ή στην κινητή μονάδα ακτίνων X.

2. Επιλέξτε άλλη κενή μικρογραφία για τον ίδιο ανιχνευτή DR. Δημιουργήστε μία αν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη.

Με αυτό τον τρόπο ξεκινά μια διαδικασία ανάκτησης εικόνας από τον ανιχνευτή.

3. Στη γραμμή τίτλου, πρέπει να εμφανιστεί μια νέα εξέταση που περιέχει την ανακτηθείσα εικόνα.

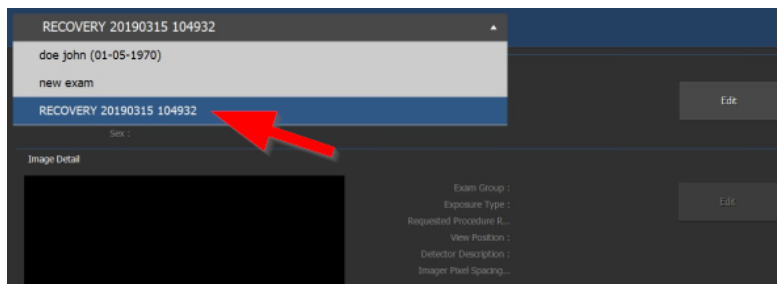

Μεταφέρετε την εικόνα στον σωστό ασθενή χρησιμοποιώντας το κουμπί **Μεταφορά συνεδρίας** στο παράθυρο Εξέταση.

Για να επανεκκινήσετε το NX, μεταβείτε στο **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** και κάντε κλικ στην επιλογή **Πλήρης επανεκκίνηση του NX**.

4. Αν δεν εμφανιστεί εικόνα στο NX μετά από 3 λεπτά, επανεκκινήστε το NX

5. Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται εικόνα στο NX, επανεκκινήστε τον ανιχνευτή.

Η εικόνα δεν μπορεί να ανακτηθεί. Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό υποστήριξης για να διερευνήσετε το πρόβλημα.

Εκκίνηση του ανιχνευτή

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο ή στυλό/roller ball για να χειριστείτε το **κουμπί ενεργοποίησης** του ανιχνευτή!