

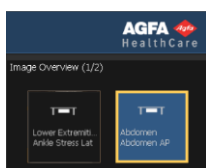


Bildegjenoppretting

Problem: Det tas et bilde med en DR-detektor, men det vises ikke i undersøkelsen.

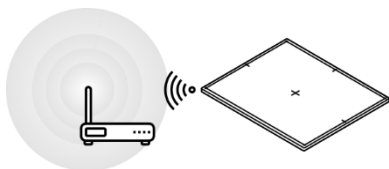

Advarsel:
Ikke slå av DR-detektoren eller røntgensystemet! Bildet går tapt.

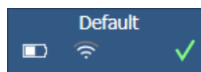


1. Kontroller Wi-Fi-tilkoblingsstatus og sett DR-detektoren nær Wi-Fi-tilgangspunktet eller nær den mobile røntgenenheten.

2. Velg et annet tomt miniatyrbilde for samme DR-detektor. Opprett et hvis ingen er tilgjengelige.

Dette gjør at systemet kan motta det manglende bildet fra detektoren.

3. En ny undersøkelse som inneholder det gjenopprettede bildet, skal vises i tittellinjen.

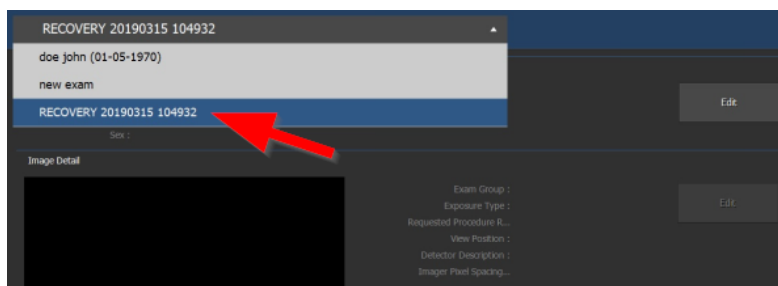

Overfør bildet til riktig pasient med **Overfør økt**-knappen i Undersøkelse-vinduet.

For å starte NX på nytt går du til **Kontrollcenter for MUSICA Acquisition Workstation > NX** og klikker på **Start NX helt på nytt**.

Fjern batteriet for å slå av detektoren. Sett inn batteriet for å slå på detektoren.

4. Start NX på nytt hvis bildet ikke vises i NX etter 3 minutter

5. Start detektoren på nytt hvis bildet fremdeles ikke vises i NX.

Bildet kan ikke gjenopprettes. Kontakt den lokale brukerstøtteavdeling for å undersøke problemet.

Starte detektoren

Ikke bruk en skarp gjenstand eller penn/rollerpenn til å operere **av/på-knappen** til detektoren!

Mens du starter detektoren, må du holde denn unna rekkevidden til den **infrarøde porten** som er koblet til NX-arbeidsstasjonen!

Bildegjenoppretting

Problem: Det tas et bilde med en DR-detektor, men det vises ikke i undersøkelsen.




ADVARSEL:
Ikke slå av DR-detektoren eller røntgensystemet! Bildet går tapt.



ADVARSEL:
IKKE velg et miniatyrbilde for en annen DR-detektor! Bildet går tapt.




ADVARSEL:
IKKE start NX på nytt! Bildet går tapt.

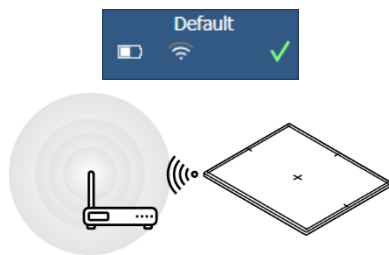

1. Kontroller Wi-Fi-tilkoblingsstatusen og sett DR-detektoren nær Wi-Fi-tilgangspunktet eller nær den mobile røntgenenheten.

Dette starter en prosess for bildegjenoppretting fra detektoren.

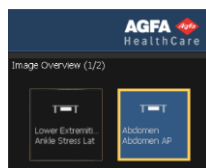

2. Det gjenoprettede bildet skal vises i miniatyrbildet.

For å starte NX på nytt går du til **Kontrollcenter for MUSICA Acquisition Workstation > NX** og klikker på **Start NX helt på nytt**.

3. **Start NX på nytt og start detektoren på nytt hvis bildet ikke vises i NX etter 10 minutter.**

Bildet kan ikke gjenoprettes. Kontakt den lokale brukerstøtteavdeling for å undersøke problemet.



Bildegjenoppretting

Problem: Det tas et bilde med en DR-detektor, men det vises ikke i undersøkelsen.



ADVARSEL:

Ikke slå av DR-detektoren eller røntgensystemet! Bildet går tapt.

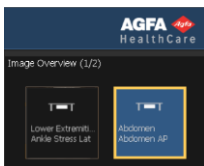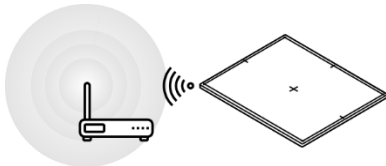


1. Kontroller Wi-Fi-tilkoblingsstatusen og sett DR-detektoren nær Wi-Fi-tilgangspunktet eller nær den mobile røntgenenheten.

2. Velg et annet tomt miniatyrbilde for samme DR-detektor. Opprett et hvis ingen er tilgjengelige.

Dette starter en prosess for bildegjenoppretting fra detektoren.

3. En ny undersøkelse som inneholder det gjenopprettede bildet, skal vises i tittellinjen.

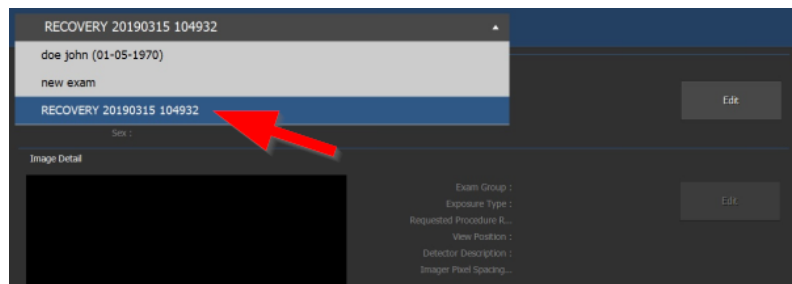

Overfør bildet til riktig pasient med **Overfør økt**-knappen i Undersøkelse-vinduet.

For å starte NX på nytt går du til **Kontrollsenner for MUSICA Acquisition Workstation > NX** og klikker på **Start NX helt på nytt**.

4. Start NX på nytt hvis bildet ikke vises i NX etter 3 minutter

5. Start detektoren på nytt hvis bildet fremdeles ikke vises i NX.

Bildet kan ikke gjenopprettes. Kontakt den lokale brukerstøtteavdeling for å undersøke problemet.

Starte detektoren

Ikke bruk en skarp gjenstand eller penn/rollerpenn til å operere **av/på-knappen** til detektoren!