

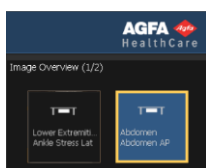


## Billedgendannelse

Problem: Et billede er akkvireret med en DR-detektor, men vises ikke i undersøgelsen.

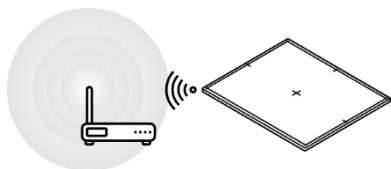

**ADVARSEL:**  
Sluk ikke for DR-detektoren eller røntgensystemet! Billederne vil gå tabt.

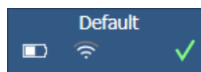


1. **Kontrollér Wi-Fi-forbindelsesstatus, og anbring DR-detektoren tæt på Wi-Fi-adgangspunktet eller på det mobile røntgenapparat.**

2. **Vælg et andet tomt thumbnail for den samme DR-detektor. Opret en, hvis ingen er tilgængelige.**

Det gør det muligt for systemet at modtage det manglende billede fra detektoren.

3. **I titellinjen skal der kunne ses en ny undersøgelse, der indeholder det gendannede billede.**

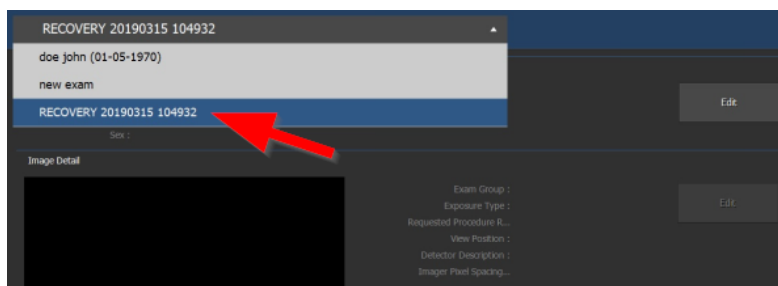

Billedet kan overføres til den korrekte patient ved hjælp af knappen **Overføringssession** i vinduet **Undersøgelse**.

For at starte NX skal du gå til kontrolcenter for **MUSICA Acquisition Workstation** > **NX** og klikke på **Genstart NX** helt.

4. **Genstart NX, hvis billedet ikke dukker op på NX efter 3 minutter**

Fjern batteriet for at slukke for detektoren. Indsæt batteriet for at tænde for detektoren.

5. **Genstart detektoren, hvis billedet stadig ikke dukker op på NX.**  
Billedet kan ikke gendannes. Kontakt din lokale supportafdeling, så de kan se på problemet.

## Start af detektoren

Brug ikke en skarp genstand eller kuglepen til at betjene detektorens **strømknap**!

Når du starter detektoren, skal du holde den uden for rækkevidden af den **infrarøde port**, der er sluttet til NX-arbejdsstationen!

## Billedgendannelse

Problem: Et billede er akkvireret med en DR-detektor, men vises ikke i undersøgelsen.




**ADVARSEL:**  
Sluk ikke for DR-detektoren eller røntgensystemet! Billederne vil gå tabt.



**ADVARSEL:**  
Vælg IKKE et miniaturebillede for en anden DR-detektor! Billederne vil gå tabt.




**ADVARSEL:**  
Genstart IKKE NX! Billederne vil gå tabt.

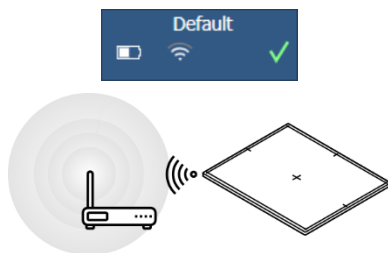

1. Kontrollér Wi-Fi-forbindelsesstatus, og anbring DR-detektoren tæt på Wi-Fi-adgangspunktet eller på det mobile røntgenapparat.

Dette påbegynder en billedgendannelsesproces fra detektoren.

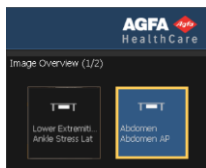

2. I miniaturebilledet skal det gendannede billede vises.

For at genstarte NX skal du gå til kontrolcenter for **MUSICA Acquisition Workstation > NX** og klikke på **Genstart NX helt**.

3. Hvis billedet ikke dukker op på NX efter 10 minutter, skal du genstarte NX og genstarte detektoren.

Billedet kan ikke gendannes. Kontakt din lokale supportafdeling, så de kan se på problemet.



## Billedgendannelse

Problem: Et billede er akkvireret med en DR-detektor, men vises ikke i undersøgelsen.



### ADVARSEL:

Sluk ikke for DR-detektoren eller røntgensystemet! Billederne vil gå tabt.

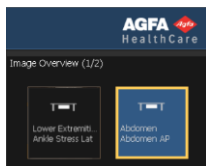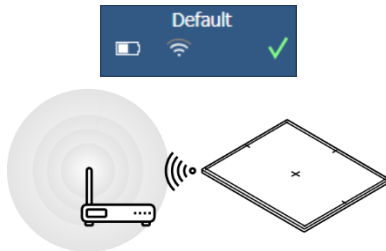


1. Kontrollér Wi-Fi-forbindelsesstatus, og anbring DR-detektoren tæt på Wi-Fi-adgangspunktet eller på det mobile røntgenapparat.

2. Vælg et andet tomt thumbnail for den samme DR-detektor. Opret en, hvis ingen er tilgængelige.

Dette påbegynder en billedgendannelsesproces fra detektoren.

3. I titellinjen skal der kunne ses en ny undersøgelse, der indeholder det gendannede billede.

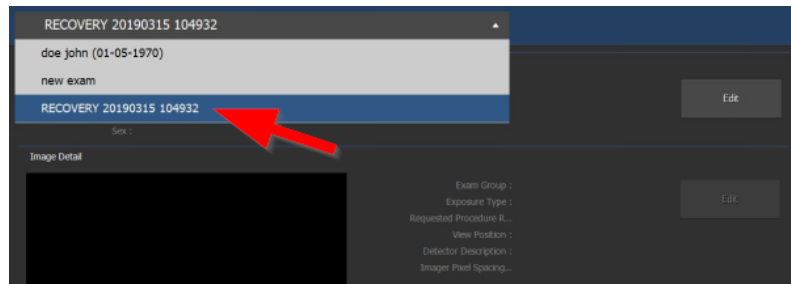

Billedet kan overføres til den korrekte patient ved hjælp af knappen **Overføringsession** i vinduet **Undersøgelse**.

For at starte NX skal du gå til kontrolcenter for **MUSICA Acquisition Workstation** > **NX** og klikke på **Genstart NX** helt.

4. Genstart NX, hvis billedet ikke dukker op på NX efter 3 minutter

5. Genstart detektoren, hvis billedet stadig ikke dukker op på NX.

Billedet kan ikke gendannes. Kontakt din lokale supportafdeling, så de kan se på problemet.

## Start af detektoren

Brug ikke en skarp genstand eller kuglepen til at betjene detektorens **strømknap**!