




Kuvan palautus

Ongelma: DR-ilmaisimella on hankittu kuva, mutta se ei näy tutkimuksessa.



VAROITUS:

Älä sammuta DR-ilmaisinta tai röntgenjärjestelmää! Kuva katoaa.

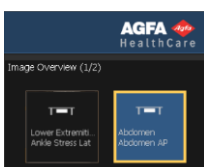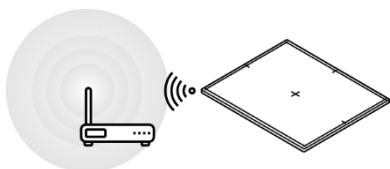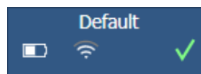


1. Tarkasta Wifi-yhteyden tila ja laita DR-ilmaisimelle lähelle Wifi-reititintä tai siirrettävää röntgenlaitetta.

2. Valitse toinen tyhjä pienoiskuva samalle DR-ilmaisimelle. Luo uusi pienoiskuva, jos yhtään kuvaa ei ole valittavissa.

Näin järjestelmä voi vastaanottaa puuttuvan kuvan ilmaisimesta.

3. Otsikkopalkkiin pitäisi tulla näkyviin uusi tutkimus, joka sisältää palautetun kuvan.

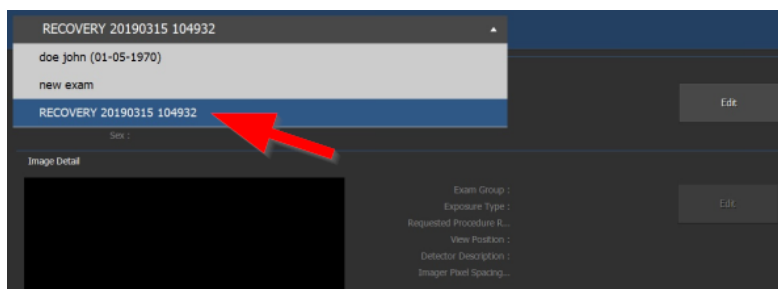

Siirrä kuva oikeaan potilaaseen käyttämällä Tutkimus-ikkunan **Siirrä istunto** -painiketta.

Käynnistä NX uudelleen valitsemalla **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** ja napsauttamalla **Käynnistä NX uudelleen**.

4. Jos kuva ei ilmesty NX-työasemalle 3 minuutin kuluessa, käynnistä NX uudelleen

Sammuta ilmaisimien irrottamalla akku. Kytke virta ilmaisimeen laittamalla akku paikalleen.

5. Jos kuva ei edelleenkään tule näkyviin NX:ssä, käynnistä ilmaisimien uudelleen.

Kuvaa ei voi palauttaa. Ota yhteyttä paikalliseen tukiohjaamiseen ongelman tutkimiseksi.

Ilmaisimen käynnistäminen

Älä paina ilmaisimen **virtapainiketta** terävällä esineellä tai kynällä!

Ilmaisinta käynnistettäessä pidä se kaukana **infrapunaportista**, joka on yhdistetty NX-työasemaan!

Kuvan palautus

Ongelma: DR-ilmaisimella on hankittu kuva, mutta se ei näy tutkimuksessa.




VAROITUS:
Älä sammuta DR-ilmaisinta tai röntgenjärjestelmää! Kuva katoaa.




VAROITUS:
ÄLÄ valitse toisen DR-ilmaisimen pienoiskuvaa! Kuva katoaa.



VAROITUS:
ÄLÄ käynnistä NX:ää uudelleen! Kuva katoaa.

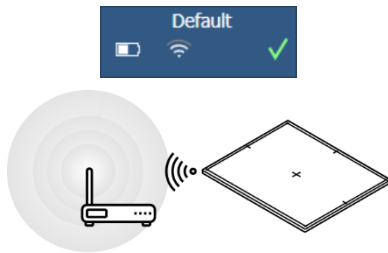

1. Tarkasta Wifi-yhteyden tila ja laita DR-ilmaisin lähelle Wifi-reititintä tai siirrettävää röntgenlaitetta. Tämä käynnistää kuvan palautusprosessin ilmaisimesta.

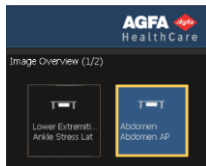

2. Pienoiskuvaan pitäisi tulla näkyviin palautettu kuva.

Käynnistä NX uudelleen valitsemalla MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX ja napsauttamalla Käynnistä NX uudelleen.

3. Jos kuva ei ilmesty NX-työasemalle 10 minuutin kuluessa, käynnistä NX uudelleen ja käynnistä ilmaisimien uudelleen.

Kuvaa ei voi palauttaa. Ota yhteyttä paikalliseen tukijärjestelmään ongelman tutkimiseksi.



Kuvan palautus

Ongelma: DR-ilmaisimella on hankittu kuva, mutta se ei näy tutkimuksessa.



VAROITUS:

Älä sammuta DR-ilmaisinta tai röntgenjärjestelmää! Kuva katoaa.

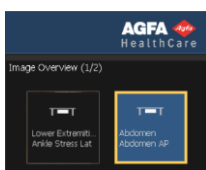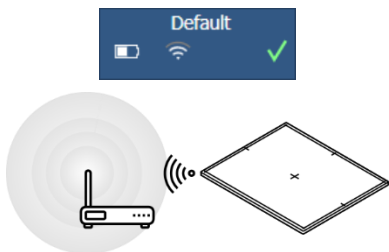


1. Tarkasta Wifi-yhteyden tila ja laita DR-ilmaisim lähelle Wifi-reititintä tai siirrettävää röntgenlaitetta.

2. Valitse toinen tyhjä pienoiskuva samalle DR-ilmaisimelle. Luo uusi pienoiskuva, jos yhtään kuvaa ei ole valittavissa.

Tämä käynnistää kuvan palautusprosessin ilmaisimesta.

3. Otsikkopalkkiin pitäisi tulla näkyviin uusi tutkimus, joka sisältää palautetun kuvan.

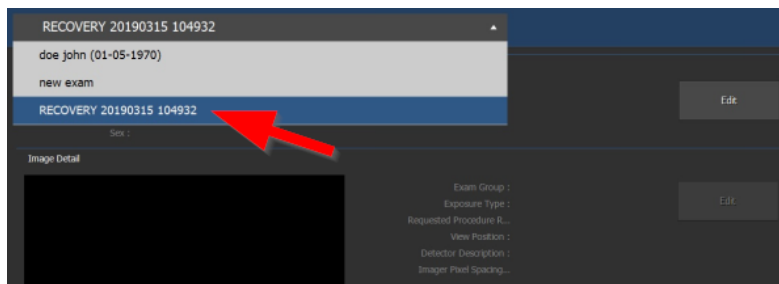

Siirrä kuva oikeaan potilaaseen käyttämällä Tutkimus-ikkunan **Siirrä istunto** -painiketta.

Käynnistä NX uudelleen valitsemalla **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** ja napsauttamalla **Käynnistä NX uudelleen**.

4. Jos kuva ei ilmesty NX-työasemalle 3 minuutin kuluessa, käynnistä NX uudelleen

5. Jos kuva ei edelleenkään tule näkyviin NX:ssä, käynnistä ilmaisim uudelleen.

Kuvaa ei voi palauttaa. Ota yhteyttä paikalliseen tukiorganisaatioon ongelman tutkimiseksi.

Ilmaisimen käynnistäminen

Älä paina ilmaisimen **virtapainiketta** terävällä esineellä tai kynällä!