

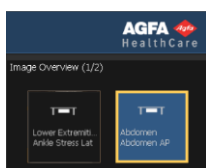


Récupération des images

Problème : une image est acquise à l'aide d'un détecteur DR, mais elle n'est pas affichée dans l'examen.

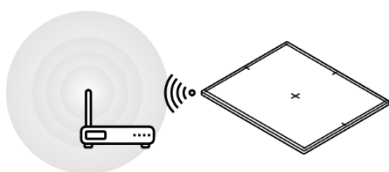

AVERTISSEMENT :
n'éteignez pas le détecteur DR ou le système de radiographie ! L'image sera perdue .

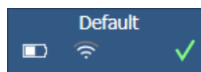


1. Vérifiez le statut de la connexion Wi-Fi et placez le détecteur DR à proximité du point d'accès Wi-Fi ou de l'appareil radiographique mobile.

2. Sélectionnez une autre vignette vide pour le même détecteur DR. Créez-en une si aucune n'est disponible.

Ceci permet au système de recevoir l'image manquante en provenance du détecteur.

3. Dans la barre de titre, un nouvel examen contenant l'image récupérée devrait apparaître.

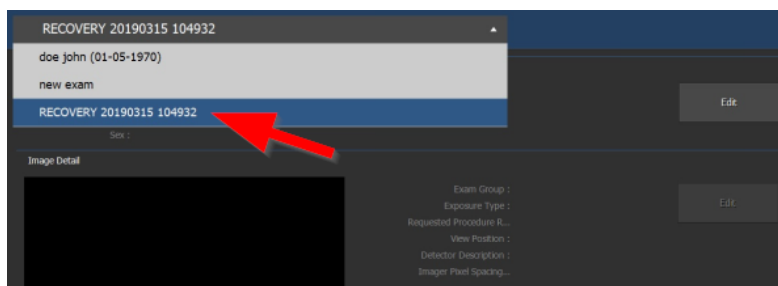

Transférez l'image au bon patient à l'aide du bouton **Transférer la session** dans la fenêtre Examen.

Pour redémarrer NX, accédez au Centre de contrôle de **MUSICA Acquisition Workstation** >NX et cliquez sur **Redémarrer NX** complètement.

4. Si l'image ne s'affiche pas sur NX après 3 minutes, redémarrez NX

Pour éteindre le détecteur, retirez la batterie. Pour allumer le détecteur, insérez la batterie.

5. Si l'image ne s'affiche toujours pas sur NX, redémarrez le détecteur.

L'image ne peut pas être récupérée. Contactez votre service d'assistance local pour enquêter sur le problème.

Démarrage du détecteur

N'utilisez pas d'objet pointu, de stylo ou de stylo à bille pour actionner le **bouton d'alimentation** du détecteur.

Lors du démarrage du détecteur, gardez-le hors de portée du **port infrarouge** qui est connecté au poste de travail NX !

Récupération des images

Problème : une image est acquise à l'aide d'un détecteur DR, mais elle n'est pas affichée dans l'examen.




AVERTISSEMENT :
n'éteignez pas le détecteur DR ou le système de radiographie ! L'image sera perdue .



AVERTISSEMENT :
ne sélectionnez PAS la vignette d'un autre détecteur de DR ! L'image sera perdue .




AVERTISSEMENT :
ne redémarrez PAS NX ! L'image sera perdue.

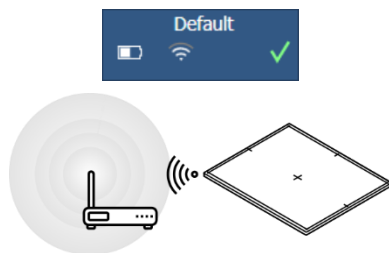

1. Vérifiez le statut de la connexion Wi-Fi et placez le détecteur DR à proximité du point d'accès Wi-Fi ou de l'appareil radiographique mobile.

Cela lance un processus de récupération des images depuis le détecteur.

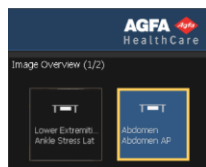

2. L'image récupérée devrait apparaître dans la miniature.

Pour redémarrer NX, accédez au **Centre de contrôle de MUSICA Acquisition Workstation > NX** et cliquez sur **Redémarrer NX complètement**.

3. Si l'image ne s'affiche pas sur NX au bout de **10 minutes**, redémarrez NX et le détecteur.

L'image ne peut pas être récupérée. Contactez votre service d'assistance local pour enquêter sur le problème.



Récupération des images

Problème : une image est acquise à l'aide d'un détecteur DR, mais elle n'est pas affichée dans l'examen.



AVERTISSEMENT :

n'éteignez pas le détecteur DR ou le système de radiographie ! L'image sera perdue .

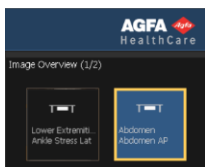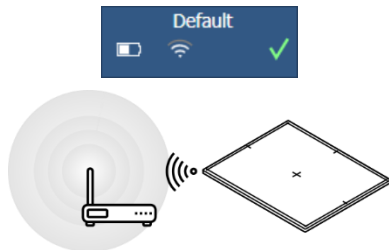


1. Vérifiez le statut de la connexion Wi-Fi et placez le détecteur DR à proximité du point d'accès Wi-Fi ou de l'appareil radiographique mobile.

2. Sélectionnez une autre vignette vide pour le même détecteur DR. Créez-en une si aucune n'est disponible.

Cela lance un processus de récupération des images depuis le détecteur.

3. Dans la barre de titre, un nouvel examen contenant l'image récupérée devrait apparaître.

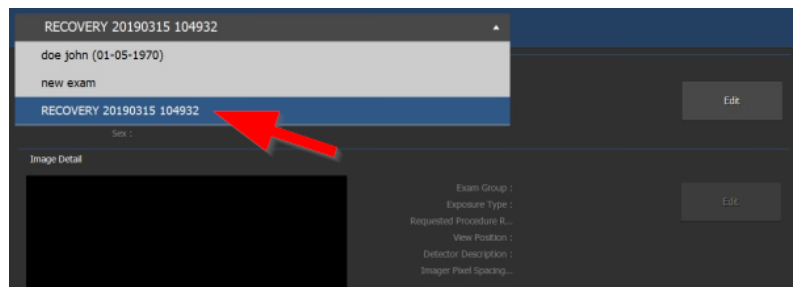

Transférez l'image au bon patient à l'aide du bouton **Transférer la session** dans la fenêtre Examen.

Pour redémarrer NX, accédez au Centre de contrôle de **MUSICA Acquisition Workstation** > **NX** et cliquez sur **Redémarrer NX complètement**.

4. Si l'image ne s'affiche pas sur NX après 3 minutes, redémarrez NX

5. Si l'image ne s'affiche toujours pas sur NX, redémarrez le détecteur.

L'image ne peut pas être récupérée. Contactez votre service d'assistance local pour enquêter sur le problème.

Démarrage du détecteur

N'utilisez pas d'objet pointu, de stylo ou de stylo à bille pour actionner le **bouton d'alimentation** du détecteur.