

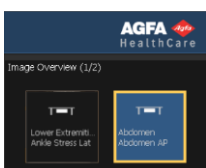


Recupero delle immagini

Problema: un'immagine acquisita mediante un rivelatore DR non viene visualizzata nell'esame.

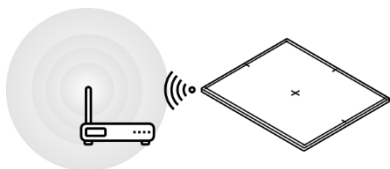

ATTENZIONE:
non spegnere il rivelatore DR o il sistema a raggi X. L'immagine verrà perduta.

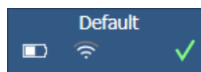


1. Verificare lo stato della connessione Wi-Fi e avvicinare il rivelatore DR al punto di accesso Wi-Fi o all'unità radiologica mobile.

2. Selezionare un'altra miniatura vuota per lo stesso Rivelatore DR. Se non è disponibile nessuna miniatura, crearne una.

Ciò consente al sistema di ricevere l'immagine mancante dal rivelatore.

3. Nella barra del titolo, dovrebbe comparire un nuovo esame contenente l'immagine recuperata.

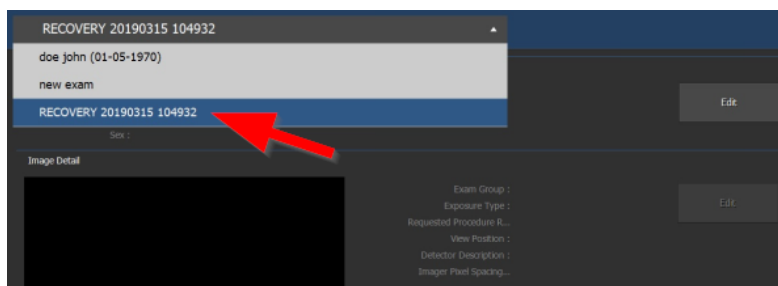

Trasferire l'immagine al paziente corretto utilizzando il pulsante **Sessione di trasferimento** nella finestra Esame.

Per riavviare NX, andare al **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > **NX** e fare clic su **Restart NX Completely** (Riavvia NX completamente).

4. Se l'immagine non compare su NX dopo 3 minuti, riavviare NX

Per spegnere il rivelatore, rimuovere la batteria. Per accendere il rivelatore, inserire la batteria.

5. Se l'immagine continua a non comparire su NX, riavviare il rivelatore.

L'immagine non può essere recuperata. Contattare il servizio di assistenza locale per investigare il problema.

Avvio del rivelatore

Non utilizzare un oggetto affilato o una penna/penna a sfera per azionare il **pulsante di accensione** del rivelatore!

Durante l'avvio del rivelatore, tenerlo lontano dalla portata della **porta a infrarossi** collegata alla Stazione di lavoro NX!

Recupero delle immagini

Problema: un'immagine acquisita mediante un rivelatore DR non viene visualizzata nell'esame.




ATTENZIONE:
non spegnere il rivelatore DR o il sistema a raggi X. L'immagine verrà perduta.



ATTENZIONE:
NON selezionare una miniatura per un altro rivelatore DR! L'immagine verrà perduta.



ATTENZIONE:
NON riavviare NX! L'immagine andrà persa!

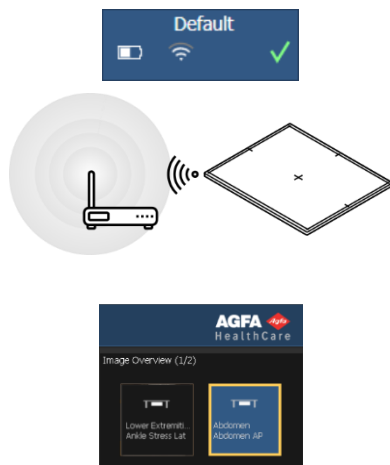

1. Verificare lo stato della connessione Wi-Fi e avvicinare il rivelatore DR al punto di accesso Wi-Fi o all'unità radiologica mobile.

In questo modo, il processo di recupero dell'immagine viene avviato dal rivelatore.

2. Nella miniatura dovrebbe comparire l'immagine recuperata.

Per riavviare NX, andare in **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** e fare clic su **Restart NX Completely** (Riavvia NX completamente).

3. Se l'immagine non compare su NX dopo 10 minuti, riavviare NX e il rivelatore.

L'immagine non può essere recuperata. Contattare il servizio di assistenza locale per investigare il problema.



Recupero delle immagini

Problema: un'immagine acquisita mediante un rivelatore DR non viene visualizzata nell'esame.



ATTENZIONE:

Non spegnere il rivelatore DR o il sistema a raggi X. L'immagine verrà perduta.

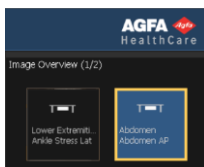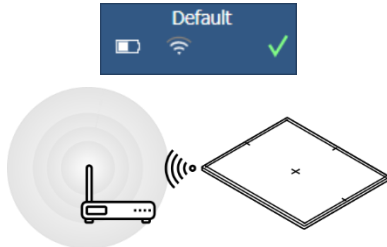


1. Verificare lo stato della connessione Wi-Fi e avvicinare il rivelatore DR al punto di accesso Wi-Fi o all'unità radiologica mobile.

2. Selezionare un'altra miniatura vuota per lo stesso Rivelatore DR. Se nessuna miniatura è disponibile, crearne una.

In questo modo, il processo di recupero dell'immagine viene avviato dal rivelatore.

3. Nella barra del titolo, dovrebbe comparire un nuovo esame contenente l'immagine recuperata.

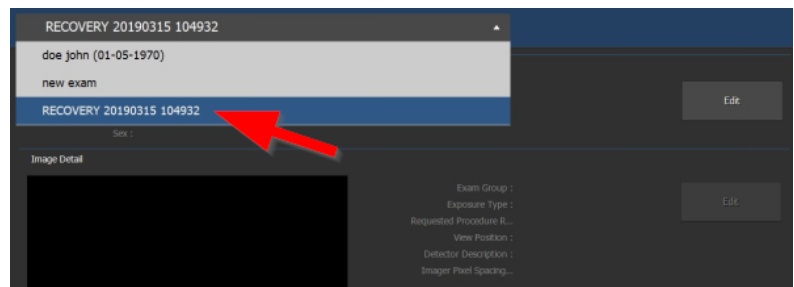

Trasferire l'immagine al paziente corretto utilizzando il pulsante **Sessione di trasferimento** nella finestra Esame.

Per riavviare NX, andare al **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > NX e fare clic su **Restart NX Completely** (Riavvia NX completamente).

4. Se l'immagine non compare su NX dopo 3 minuti, riavviare NX

5. Se l'immagine continua a non comparire su NX, riavviare il rivelatore.

L'immagine non può essere recuperata. Contattare il servizio di assistenza locale per investigare il problema.

Avvio del rivelatore

Non utilizzare un oggetto affilato o una penna/penna a sfera per azionare il **pulsante di accensione** del rivelatore!