

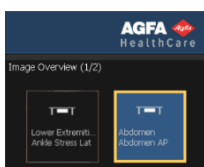


影像恢复

问题：使用平板探测器采集到了影像，但该影像未显示在检查中。

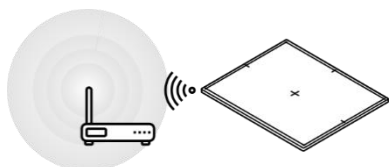

警告：
请勿关闭平板探测器或 X 射线系统的电源！影像会丢失。

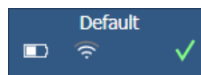


1. 检查 Wi-Fi 连接状态并将平板探测器靠近 Wi-Fi 接入点或移动 X 射线装置。

2. 为同一平板探测器选择另一空白缩略图。如果没有可用的，创建一个。

这会让系统从探测器接收丢失的影像。

3. 包含恢复的影像的新检查应该会出现标题栏。

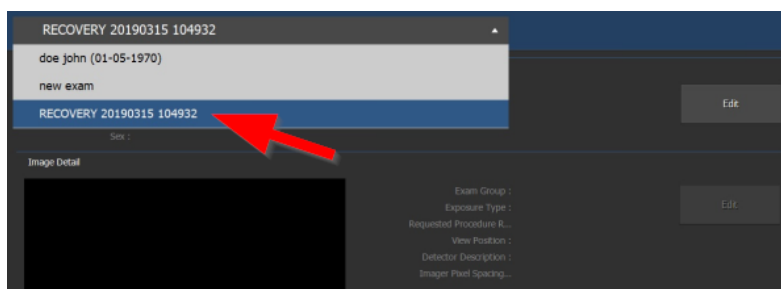

可以使用检查窗口中的**传输会话**按钮，将影像传输给正确的患者。

若要重启 NX，请进入 **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** 并点击**彻底重启 NX**。

4. 如果 3 分钟后，NX 上未显示影像，重新启动 NX

要关闭探测器，请取出电池。要打开探测器，请插入电池。

5. 如果影像仍未显示在 NX 上，请重启探测器。

影像无法恢复。请与您当地支持机构联系，以调查这个问题。

启动探测器。

不得使用尖锐的物品或钢笔/圆珠笔操作探测器的**电源按钮**。

启动探测器时，将其置于连接于 NX 工作站的**红外端口**范围之外！

影像恢复

问题：使用平板探测器采集到了影像，但该影像未显示在检查中。




警告：
请勿关闭平板探测器或 X 射线系统的电源！影像会丢失。



警告：
请勿为另一台平板探测器选择缩略图！影像会丢失。




警告：
请勿重启 NX！影像会丢失。

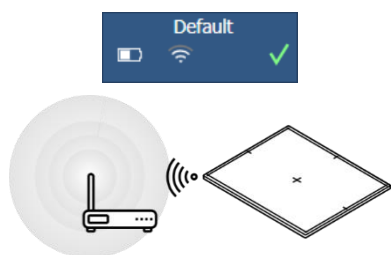

1. 检查 Wi-Fi 连接状态并将平板探测器靠近 Wi-Fi 接入点或移动 X 射线装置。

这会从探测器中启动图像恢复程序。

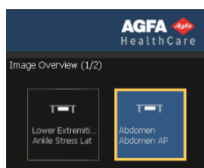

2. 恢复的图像应出现在缩略图中。

若要重启 NX，请进入 **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** 并点击 **彻底重启 NX (Restart NX Completely)**。

3. 如果 10 分钟后，NX 上未显示图像，重新启动 NX 和平板探测器。



影像无法恢复。请与您当地支持机构联系，以调查这个问题。

影像恢复

问题：使用平板探测器采集到了影像，但该影像未显示在检查中。



警告：
请勿关闭平板探测器或 X 射线系统的电源！影像会丢失。

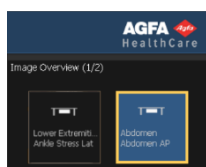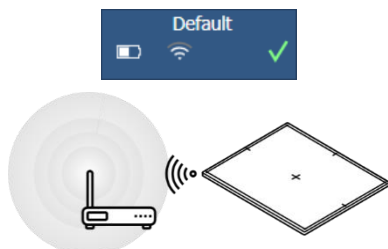


1. 检查 Wi-Fi 连接状态并将平板探测器靠近 Wi-Fi 接入点或移动 X 射线装置。

2. 为同一平板探测器选择另一空白缩略图。如果没有可用的，创建一个。

这会从探测器中启动图像恢复程序。

3. 包含恢复的影像的新检查应该会出现在标题栏。

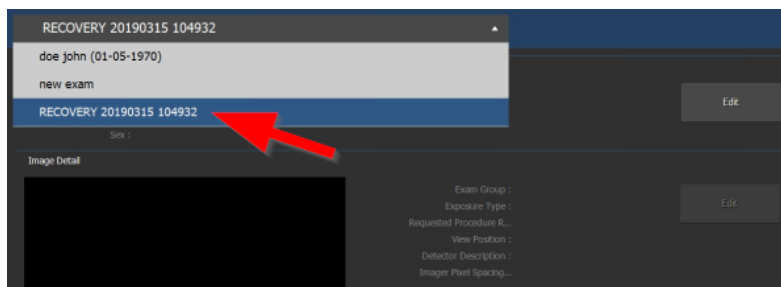

可以使用检查窗口中的**传输会话**按钮，将影像传输给正确的患者。

若要重启 NX，请进入 **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX** 并点击**彻底重启 NX**。

4. 如果 3 分钟后，NX 上未显示影像，重新启动 NX

5. 如果影像仍未显示在 NX 上，请重启探测器。

影像无法恢复。请与您当地支持机构联系，以调查这个问题。

启动探测器。

不得使用尖锐的物品或钢笔/圆珠笔操作探测器的**电源按钮**。