



Bildåterställning

Problem: en bild hämtas med hjälp av en DR-detektor, men visas inte i undersökningen.

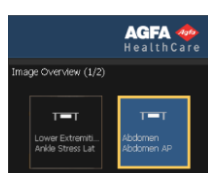

WARNING:
Stäng inte av DR-detektorn eller röntgensystemet! Bilden kommer att förloras.

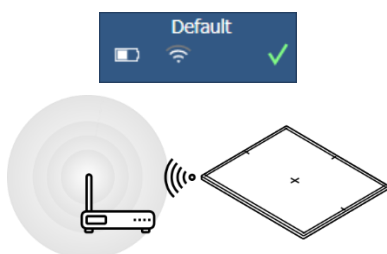


1. Kontrollera WiFi-anslutningsstatus och placera DR-detektorn nära WiFi-accesspunkten eller den mobila röntgenenheten.

2. Välj en annan tom miniatyrbild för samma DR-detektor. Skapa en om ingen finns tillgänglig.

Det gör det möjligt för systemet att ta emot den saknade bilden från detektorn.

3. I namnlistan visas en ny undersökning som innehåller den återställda bilden.

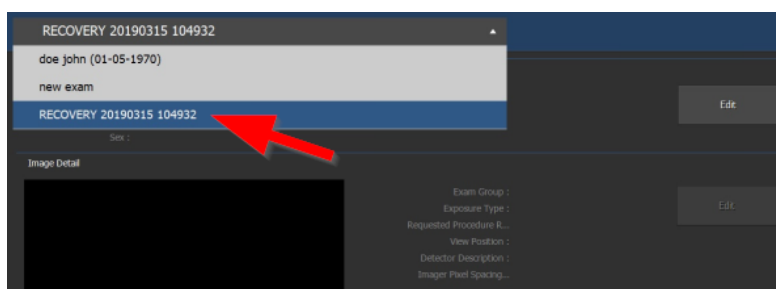

Överför bilden till rätt patient med hjälp av knappen **Överförings-session** i fönstret Undersökning.

För att starta om NX går du till **kontrollcentret i MUSICA Acquisition Workstation > NX** och klickar på **Restart NX Completely** (Starta om NX fullständigt).

4. Om bilden inte visas på NX efter 3 minuter startar du om NX

Stäng av detektorn genom att ta ut batteriet. Sätt på detektorn genom att sätta in batteriet.

5. Om bilden fortfarande inte visas på NX startar du om detektorn.

Bilden kan inte återställas. Kontakta ditt lokala supportcenter för att utreda problemet.

Starta detektorn

Använd inte ett vasst föremål eller penna/kulspetspenna för att hantera detektorns **strömknapp!**

När du startar detektorn ska du hålla den utom räckhåll för den **infraröda porten** som är ansluten till NX-arbetsstationen!

Bildåterställning

Problem: en bild hämtas med hjälp av en DR-detektor, men visas inte i undersökningen.




WARNING:
Stäng inte av DR-detektorn eller röntgensystemet! Bilden kommer att förloras.



WARNING:
Välj INTE en miniatyrbild för en annan DR-detektor! Bilden kommer att förloras.




WARNING:
Starta INTE om NX! Bilden kommer att gå förlorad.

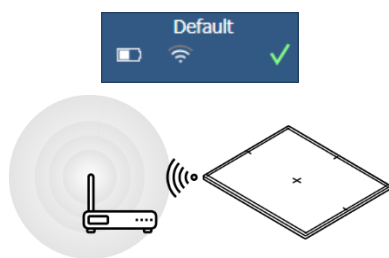

1. Kontrollera WiFi-anslutningsstatus och placera DR-detektorn nära WiFi-accesspunkten eller den mobila röntgenenheten.

Detta initierar en bildåterställningsprocess från detektorn.

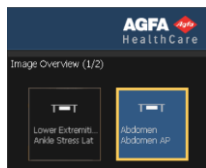

2. Den återställda bilden ska visas i miniatyrbilden.

För att starta om NX går du till kontrollcentret i **MUSICA Acquisition Workstation > NX** och klickar på **Restart NX Completely** (Starta om NX fullständigt).

3. Om bilden inte visas på NX efter 10 minuter startar du om NX och sedan detektorn.

Bilden kan inte återställas. Kontakta ditt lokala supportcenter för att utreda problemet.



Bildåterställning

Problem: en bild hämtas med hjälp av en DR-detektor, men visas inte i undersökningen.



WARNING:

Stäng inte av DR-detektorn eller röntgensystemet! Bilden kommer att förloras.

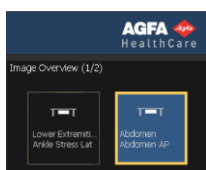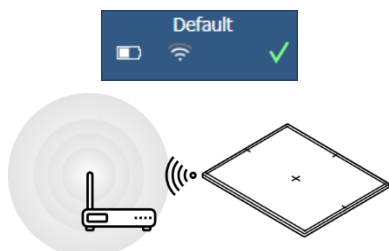


1. Kontrollera WiFi-anslutningsstatus och placera DR-detektorn nära WiFi-accesspunkten eller den mobila röntgenenheten.

2. Välj en annan tom miniatyrbild för samma DR-detektor. Skapa en om ingen finns tillgänglig.

Detta initierar en bildåterställningsprocess från detektorn.

3. I namnlistan visas en ny undersökning som innehåller den återställda bilden.

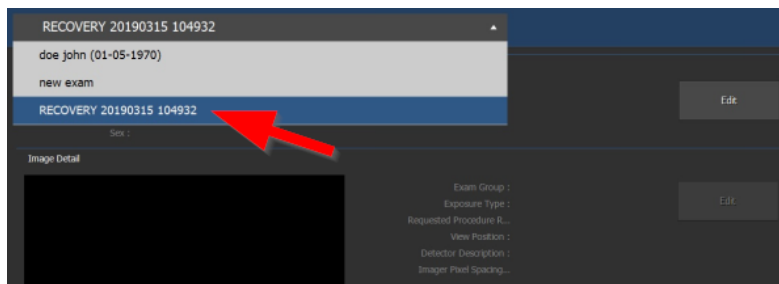

Överför bilden till rätt patient med hjälp av knappen **Överföringssession** i fönstret **Undersökning**.

För att starta om NX går du till kontrollcentret i **MUSICA Acquisition Workstation** > NX och klickar på **Restart NX Completely** (Starta om NX fullständigt).

4. Om bilden inte visas på NX efter 3 minuter startar du om NX

5. Om bilden fortfarande inte visas på NX startar du om detektorn.

Bilden kan inte återställas. Kontakta ditt lokala supportcenter för att utreda problemet.

Starta detektorn

Använd inte ett vasst föremål eller penna/kulspetspenna för att hantera detektorns **strömknapp**!