


## Obnovení snímku

Problém: snímek byl pořízen pomocí DR detektoru, avšak nezobrazuje se ve vyšetření.



### VAROVÁNÍ:

Nevypínejte DR detektor nebo rentgenový systém! Dojde ke ztrátě snímku.

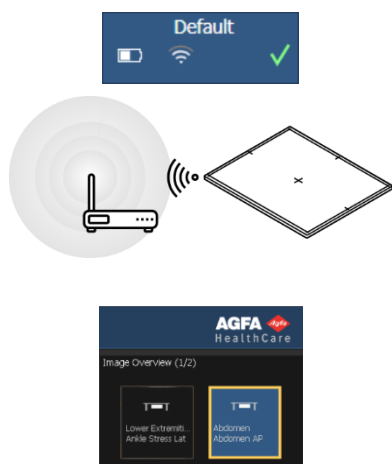


1. Zkontrolujte stav připojení Wi-Fi a umístěte detektor DR do blízkosti přístupového bodu Wi-Fi nebo mobilní rentgenové jednotky.

2. Vyberte další prázdný náhled pro stejný DR detektor. Pokud náhled není k dispozici, vytvořte jej.

System tak může přijmout chybějící snímek z detektoru.

3. V záhlaví se musí zobrazit nové vyšetření obsahující obnovený snímek.

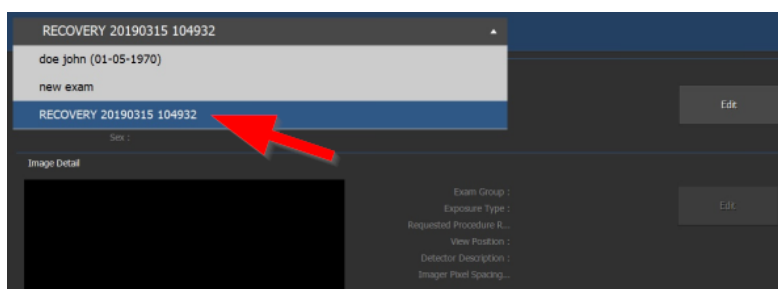

Přeneste snímek ke správnému pacientovi pomocí tlačítka **Přenosová relace** v okně Vyšetření.

Chcete-li restartovat pracovní stanici NX, přejděte do **Ovládacího centra MUSICA Acquisition Workstation > NX** a klikněte na tlačítko **Úplný restart pracovní stanice NX**.

4. Pokud se snímek v pracovní stanici NX nezobrazí po 3 minutách, restartujte stanici NX

Vypněte detektor, vyjměte baterii.  
Zapněte detektor, vložte baterii.

5. Pokud se snímek v pracovní stanici NX stále nezobrazuje, restartujte detektor.

Snímek nelze obnovit. obraťte se na vaši místní organizaci podpory s žádostí o prozkoumání problému.

## Spuštění detektoru

K ovládání **vypínače** detektoru nepoužívejte ostrý předmět, ani pero či propisovací tužku!

Během spuštění detektoru udržujte mimo dosah dětí **infračervený port**, připojený k pracovní stanici NX!

## Obnovení snímku

---

Problém: snímek byl pořízen pomocí DR detektoru, avšak nezobrazuje se ve vyšetření.



**VAROVÁNÍ:**  
Nevypínejte DR detektor nebo rentgenový systém! Dojde ke ztrátě snímku.



**VAROVÁNÍ:**  
NEVYBÍREJTE náhled pro jiný DR detektor! Dojde ke ztrátě snímku.



**VAROVÁNÍ:**  
Nerestartujte NX! Dojde ke ztrátě snímku!



1. Zkontrolujte stav připojení Wi-Fi a umístěte detektor DR do blízkosti přístupového bodu Wi-Fi nebo mobilní rentgenové jednotky.

Tím bude zahájen proces obnovení snímku z detektoru.

2. V miniatuře by se měl objevit obnovený snímek.

Chcete-li restartovat pracovní stanici NX, přejděte do ovládacího centra **MUSICA Acquisition Workstation > NX** a klikněte na tlačítko **Úplný restart pracovní stanice NX**.

3. Pokud se snímek v pracovní stanici NX nezobrazí po 10 minutách, restartujte stanici NX a restartujte detektor.

Snímek nelze obnovit. obraťte se na vaší místní organizaci podpory s žádostí o prozkoumání problému.



## Obnovení snímku

Problém: snímek byl pořízen pomocí DR detektoru, avšak nezobrazuje se ve vyšetření.



### VAROVÁNÍ:

**Nevypínejte DR detektor nebo rentgenový systém! Dojde ke ztrátě snímku.**

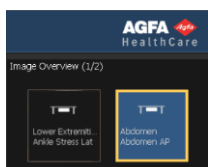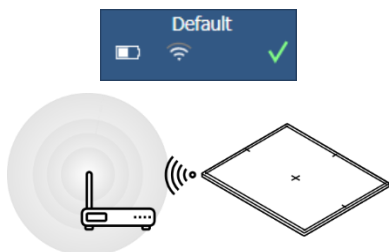


1. Zkontrolujte stav připojení Wi-Fi a umístěte detektor DR do blízkosti přístupového bodu Wi-Fi nebo mobilní rentgenové jednotky.

2. Vyberte další prázdný náhled pro stejný DR detektor. Pokud náhled není k dispozici, vytvořte jej.

Tím bude zahájen proces obnovení snímku z detektoru.

3. V záhlaví se musí zobrazit nové vyšetření obsahující obnovený snímek.

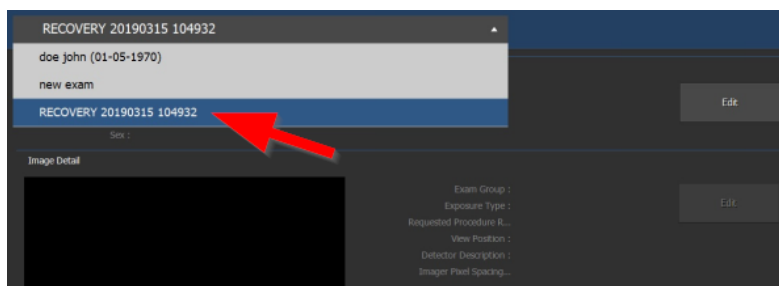

Přenesete snímek ke správnému pacientovi pomocí tlačítka **Přenosová relace** v okně Vyšetření.

Chcete-li restartovat pracovní stanici NX, přejděte do **Ovládacího centra MUSICA Acquisition Workstation > NX** a klikněte na tlačítko **Úplný restart pracovní stanice NX**.

4. Pokud se snímek v pracovní stanici NX nezobrazí po 3 minutách, restartujte stanici NX

5. Pokud se snímek v pracovní stanici NX stále nezobrazuje, restartujte detektor.

Snímek nelze obnovit. Obráťte se na vaši místní organizaci podpory s žádostí o prozkoumání problému.

## Spuštění detektoru

K ovládání **vypínače** detektoru nepoužívejte ostrý předmět, ani pero či propisovací tužku!