


Recuperação de imagem

Problema: é obtida uma imagem com um detector de DR, mas não aparece no exame.



ADVERTÊNCIA:
Não desligue o detector de DR ou o sistema de raios X! A imagem será perdida.

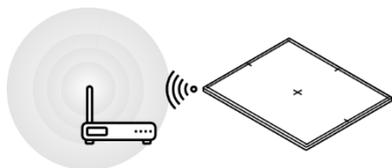


1. Verifique o estado da conexão Wi-Fi e coloque o detector de DR perto do ponto de acesso Wi-Fi ou da unidade móvel de raios X.

2. Selecione outra miniatura em branco para o mesmo detector de DR. Crie uma se nenhuma estiver disponível.

Isso permite que o sistema receba a imagem ausente do detector.

3. Na barra do título, deve aparecer um novo exame com a imagem recuperada.

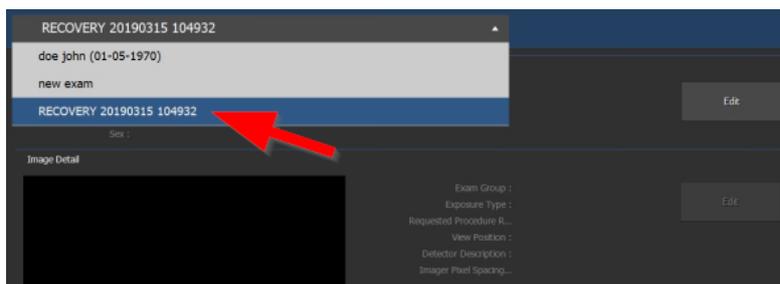

Transfira a imagem para o paciente certo com o botão **Transferir sessão** na janela Exame.

Para reiniciar a NX, acesse o **Centro de comando da MUSICA Acquisition Workstation > NX** e clique em **Reiniciar completamente a NX**.

4. Se a imagem não surgir na NX 3 minutos depois, reinicie-a

Para desligar o detector, remova a bateria. Para ligar o detector, insira a bateria.

5. Se a imagem continuar a não surgir na NX, reinicie o detector.

Não é possível recuperar a imagem. Contate a assistência técnica local para investigar o problema.

Ligar o detector

Não use um objeto afiado ou caneta/esferográfica para operar o **botão de ligar/desligar** do detector!

Ao ligar o detector, mantenha-o fora do alcance da **porta de infravermelhos** ligada à estação de trabalho NX!

Recuperação de imagem

Problema: é obtida uma imagem com um detector de DR, mas não aparece no exame.




ADVERTÊNCIA:
Não desligue o detector de DR ou o sistema de raios X! A imagem será perdida.



ADVERTÊNCIA:
NÃO selecione uma miniatura para outro detector de DR! A imagem será perdida.



ADVERTÊNCIA:
NÃO reinicie a NX! A imagem será perdida.

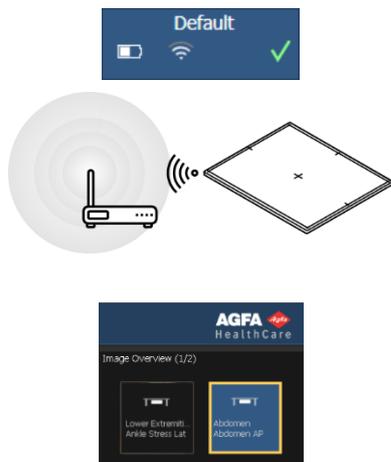

1. Verifique o estado da conexão Wi-Fi e coloque o detector de DR perto do ponto de acesso Wi-Fi ou da unidade móvel de raios X.

Isto inicia um processo de recuperação da imagem no detector.

2. Na miniatura, deve aparecer a imagem recuperada.

Para reiniciar a NX, acesse o **Centro de comando da MUSICA Acquisition Workstation > NX** e clique em **Reiniciar completamente a NX**.

3. Se a imagem não surgir na NX 10 minutos depois, reinicie-a e ao detector.

Não é possível recuperar a imagem. Contate a assistência técnica local para investigar o problema.


Recuperação de imagem

Problema: é obtida uma imagem com um detector de DR, mas não aparece no exame.



ADVERTÊNCIA:

Não desligue o detector de DR ou o sistema de raios X! A imagem será perdida.

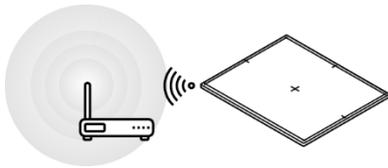


1. Verifique o estado da conexão Wi-Fi e coloque o detector de DR perto do ponto de acesso Wi-Fi ou da unidade móvel de raios X.

2. Selecione outra miniatura em branco para o mesmo detector de DR. Crie uma se nenhuma estiver disponível.

Isto inicia um processo de recuperação da imagem no detector.

3. Na barra do título, deve aparecer um novo exame com a imagem recuperada.

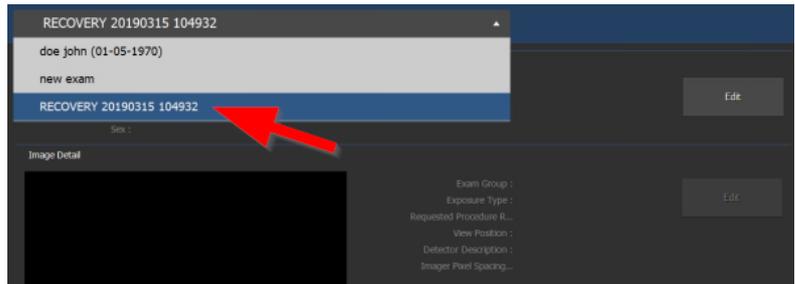

Transfira a imagem para o paciente certo com o botão **Transferir sessão** na janela Exame.

Para reiniciar a NX, acesse o **Centro de comando da MUSICA Acquisition Workstation > NX** e clique em **Reiniciar completamente a NX**.

4. Se a imagem não surgir na NX 3 minutos depois, reinicie-a

5. Se a imagem continuar a não surgir na NX, reinicie o detector.

Não é possível recuperar a imagem. Contate a assistência técnica local para investigar o problema.

Ligar o detector

Não use um objeto afiado ou caneta/esferográfica para operar o **botão de ligar/desligar** do detector!