


Kujutiste taaste

Probleem. DR-detektoriga tehakse kujutis, kuid seda ei kuvata uuringus.




HOIATUS

Ärge lülitage DR-detektorit ega röntgenisüsteemi välja! Pilt läheb kaduma.

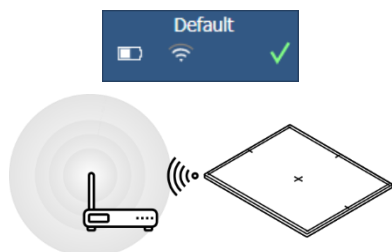


1. Kontrollige Wi-Fi-ühenduse olekut ja pange DR-detektor Wi-Fi-pääsupunkti või teisaldatava röntgeniseadme lähedale.

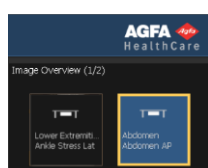

2. Valige sama DR-detektori jaoks teine tühi pisipilt. Kui seda pole olemas, siis looge see.

See võimaldab süsteemil saada puuduva pildi detektorilt.

3. Tiitliribale peaks ilmuma uus uuring koos taastatud kujutisega.

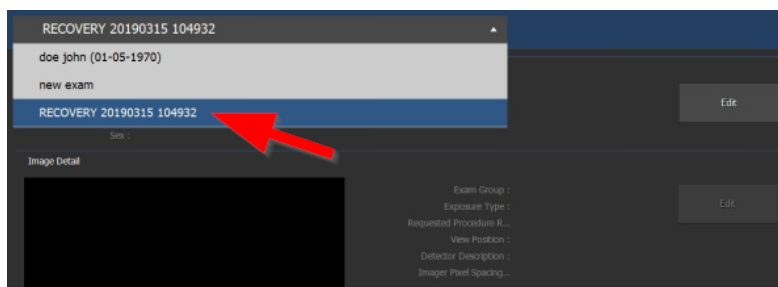

Edastage kujutis õigele patsiendile, kasutades uuringuaknas olevat nuppu **Edasta seanss**.

NX-i taaskäivitamiseks avage **MUSICA Acquisition Workstationi** juhtkeskus > **NX** ja klõpsake nuppu **Taaskäivita NX täielikult**.

4. Kui kujutist ei kuvata NX-is 3 minuti jooksul, taaskäivitage NX.

Detektori väljalülitamiseks eemaldage aku. Detektori sisselülitamiseks sisestage aku.

5. Kui endiselt ei näidata NX-is pilti, taaskäivitage detektor. Pilti ei saa taastada. Probleemi uurimiseks võtke ühendust kohaliku tugiettevõttega.

Detektori käivitamine

Ärge vajutage detektori **toitenuppu** terava eseme ega pliiaisi/pastapliiaisi otsaga!

Detektori käivitamise ajal hoidke see NX-töõjaamaga ühendatud **infrapunapordi** ulatusest väljas!

Kujutiste taaste

Probleem. DR-detektoriga tehakse kujutis, kuid seda ei kuvata uuringus.



HOIATUS

Ärge lülitage DR-detektorit ega röntgenisüsteemi välja! Pilt läheb kaduma.




HOIATUS

ÄRGE valige teise DR-detektori pisipilti! Pilt läheb kaduma.




HOIATUS

ÄRGE taaskäivitage NX-i! Kujutis läheb kaduma.

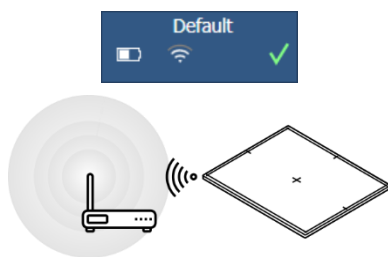

1. Kontrollige Wi-Fi-ühenduse olekut ja pange DR-detektor Wi-Fi-pääsupunkti või teisaldatava röntgeniseadme lähedale.

See käivitab pildi taasteprotsessi detektorilt.

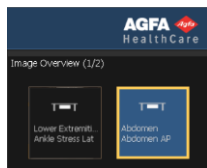

2. Taastatud kujutis peaks ilmuma pisipilti.

NX-i taaskäivitamiseks avage **MUSICA Acquisition Workstationi juhtkeskus** > **NX** ja klõpsake nuppu **Taaskäivita NX täielikult**.

3. Kui kujutist ei kuvata NX-is 10 minuti jooksul, taaskäivitage NX ja detektor.

Pilti ei saa taastada. Probleemi uurimiseks võtke ühendust kohaliku tugiettevõttega.



Kujutiste taaste

Probleem. DR-detektoriga tehakse kujutis, kuid seda ei kuvata uuringus.



HOIATUS

Ärge lülitage DR-detektorit ega röntgenisüsteemi välja! Pilt läheb kaduma.

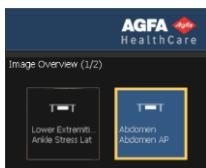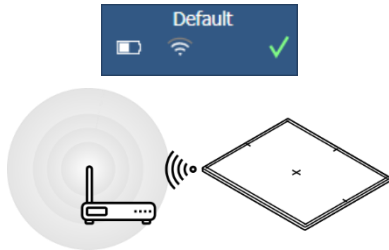


1. Kontrollige Wi-Fi-ühenduse olekut ja pange DR-detektor Wi-Fi-pääsupunkti või teiseldatava röntgeniseadme lähedale.

2. Valige sama DR-detektor jaoks teine tühi pispilt. Kui seda pole olemas, siis looge see.

See käivitab pildi taasteprotsessi detektorilt.

3. Tiitliribale peaks ilmuma uus uuring koos taastatud kujutisega.

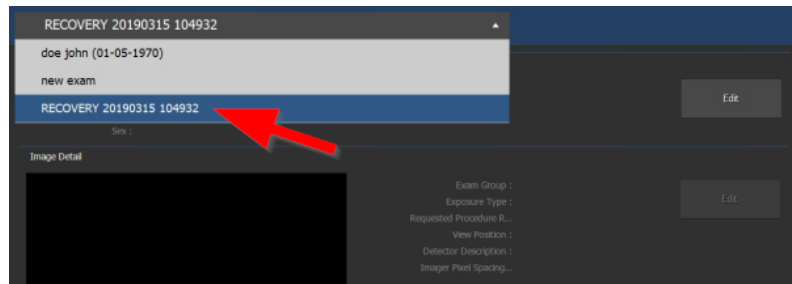

Edastage kujutis õigele patsiendile, kasutades uuringuaknas olevat nuppu **Edasta seanss**.

NX-i taaskäivitamiseks avage **MUSICA Acquisition Workstationi** juhtkeskus > NX ja klõpsake nuppu **Taaskäivita NX täielikult**.

4. Kui kujutist ei kuvata NX-is 3 minuti jooksul, taaskäivitage NX.

5. Kui endiselt ei näidata NX-is pilti, taaskäivitage detektor.

Pilti ei saa taastada. Probleemi uurimiseks võtke ühendust kohaliku tugiettevõttega.

Detektori käivitamine

Ärge vajutage detektori **toitenuppu** terava eseme ega pliitsi/pastapliitsi otsaga!