

## 1 Pornirea NX Office Viewer

- Executați dublu clic pe pictograma NX Office Viewer de pe suprafața dumneavoastră de lucru sau executați clic pe **Start > (Toate) Programe > Agfa > Start Office Viewer**.




Apare ecranul de Conectare.

- Introduceți parola dumneavoastră și executați clic pe **OK**.

Parola implicită nu conține date.

Apare ecranul inițial NX Office Viewer și aplicația se deschide în modul Normal.

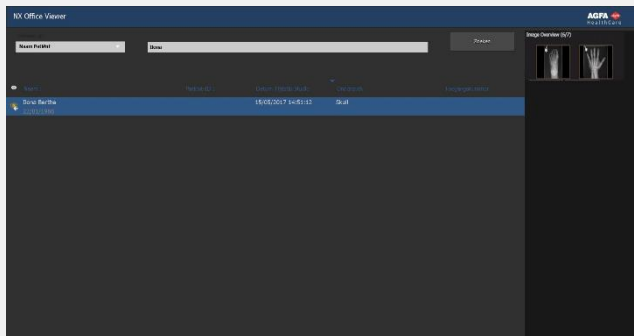

Se recomandă să înlocuiți parola implicită cu una personalizată odată cu prima conectare.

## 2 Căutarea examenelor


- În panoul Căutare, introduceți criteriile specifice de găsimă a examenelor de pe o stație de lucru de achiziție MUSICA internă.

Căutare

Puteți căuta după Nume pacient, ID pacient, Număr consultare sau Dată examen.

În variantă implicită, Dată examen este selectată cu data din ziua respectivă introdusă în câmpul-text.

- Executați clic pe **Căutare** pentru a afișa o listă de examene ce îndeplinesc criteriile dumneavoastră.

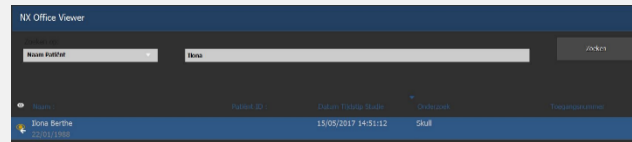

Pictograma în formă de ochi apare lângă examen, în lista de sarcini, dacă același examen este afișat pe stația de lucru de achiziție MUSICA internă. Este posibil să fie modificat de către un alt utilizator.




- Executați clic pe unul dintre anteturile coloanelor pentru a reordona lista în funcție de coloana aleasă ca și criteriu de sortare.

Puteți testa ordinele de sortare disponibile (ascendentă sau descendentă) executând din nou clic pe antetul coloanei.

## 3 Selectarea unei imagini

- Selectați un examen din listă.

În panoul Prezentare imagine, toate imaginile acestui examen apar ca miniaturi.

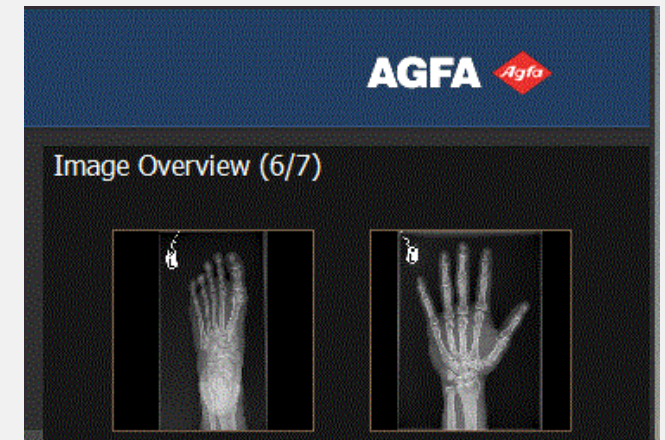

- Executați clic pe imaginea pe care doriți să o vizualizați.

Imaginea selectată este afișată pe tot ecranul. Datele demografice ale pacientului apar în colțul stânga jos, iar datele demografice ale expunerii, în colțul dreapta jos.



## 4 Vizualizarea imaginilor

**Observație:** Modificările aduse imaginilor cu Office Viewer nu afectează imaginile stocate pe stația de lucru de achiziție MUSICA.

**mărire / micșorare** Mișcați roțița mouse-ului

**parcursere** Executați clic, țineți și mișcați mouse-ul

**reglare fereastră/nivel** Executați dublu clic și mișcați mouse-ul



Executați clic pe cel de-al doilea buton al mouse-ului și selectați o opțiune din meniul de context.

**Observație:** Pentru a putea imprima o captură de ecran, o imprimantă Windows trebuie să fie instalată pe computer. Nu puteți imprima o imagine folosind o imprimantă de uz medical.

**Atenție:** Rezultatul imprimării și salvării unei capturi de ecran are întotdeauna o calitate non-diagnostic.


■ Pentru a ieși din vizualizarea pe tot ecranul, apăsați orice tastă sau executați clic pe crucea roșie din colțul dreapta sus al ferestrei aplicației.



## 5 Compararea imaginilor

■ Pentru a comuta de la modul Normal la modul Comparare, executați clic pe butonul **Mod comparare**.

■ În modul Comparare, selectați două imagini ce vor fi afișate una lângă cealaltă pe tot ecranul și executați clic pe butonul **Comparare imagini**.

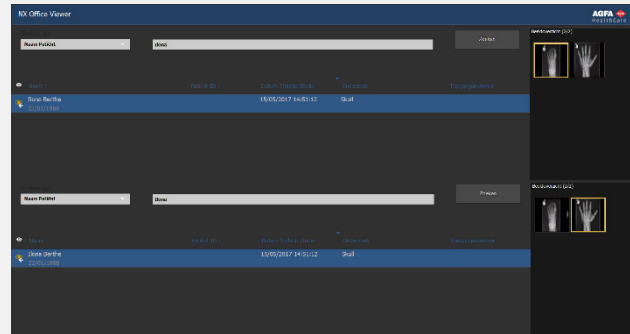

Imaginea din examenul din lista superioară de examene este afișată în partea stângă a ecranului. Imaginea din examenul din lista inferioară de examene este afișată în partea dreaptă a ecranului.



Aceleași acțiuni de vizualizare din modul Normal pot fi executate separat pe ambele imagini. Numai **Imprimare**

**captură și Salvare ca JPEG** se aplică întotdeauna ambelor imagini.